

LW05207/LW05208

HYPNOS

Pat pentru îngrijire la domiciliu Instrucțiuni de instalare

Sfaturi:


- (1) Întrețineți periodic. Asigurați-vă că toate șuruburile sunt strânse și că cablul nu s-a deteriorat sau nu este uzat. Verificați dacă nu sunt crăpături în structura de lemn.
- (2) Nu depășiți limita de greutate recomandată. Acest lucru poate duce la răni grave.
- (3) Nu utilizați curățătoare chimice pentru a curăța cadrul. Acestea ar putea deteriora suprafața. Folosiți apă rece și ștergeți cu o cârpă uscată.
- (4) Asigurați-vă că toate cele patru picioare ale patului pentru îngrijire la domiciliu sunt pe o suprafață solidă și la același nivel.

Instrucțiuni de precauție:


- (1) Întrețineți periodic. Asigurați-vă că toate șuruburile sunt strânse și că cablul nu s-a deteriorat sau nu este uzat. Verificați dacă nu sunt crăpături în structura de lemn.
- (2) Nu depășiți limita de greutate recomandată. Acest lucru ar putea duce la rănirea gravă a utilizatorului.
- (3) Nu utilizați curățătoare chimice pentru gravare la curățarea cadrului. Acestea ar putea deteriora suprafața. Folosiți apă rece și ștergeți cu o cârpă uscată.
- (4) Asigurați-vă că atunci când utilizați patul electric pentru îngrijire la domiciliu, toate cele patru picioare sunt pe o suprafață solidă și la același nivel.

Montaj:


- 1. Deschideți cutia și scoateți toate accesoriile din cutie.
- 2. Îndepărtați toate materialele de ambalaj de la accesorii.

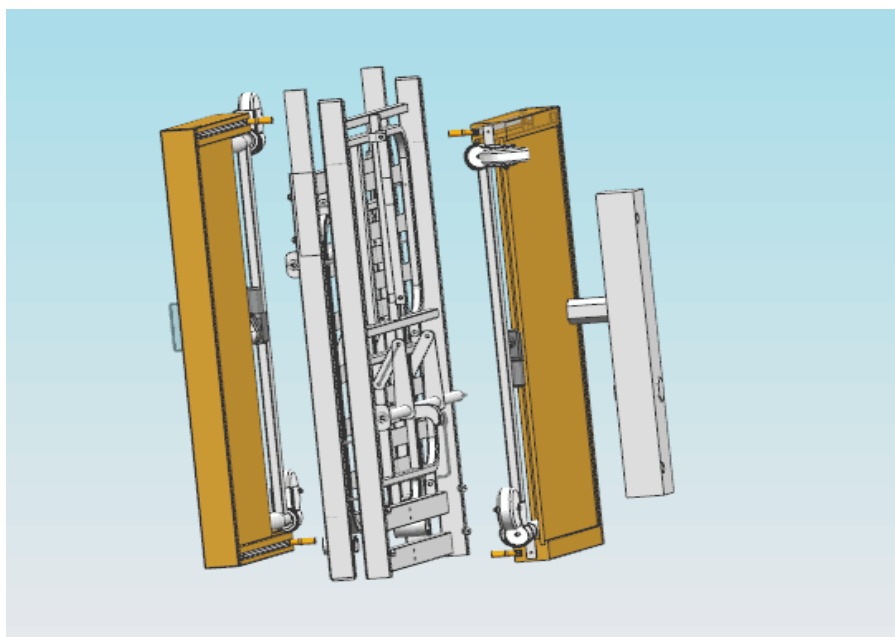

- 3. Întoarceți întregul pat pe podea.

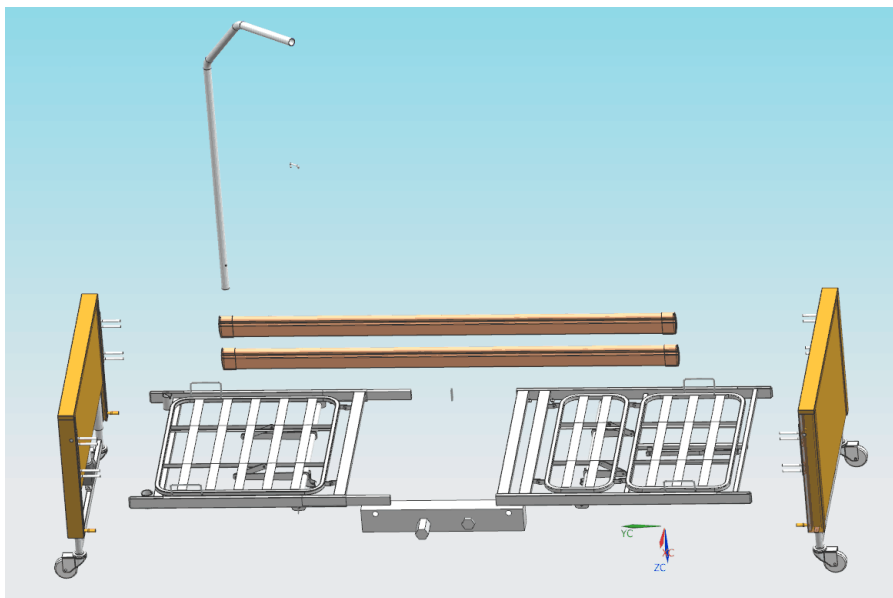

4. Asamblați suprafața patului și fixați cele 4 butoane (butoanele din cutia de piese).
5. Asamblați spătarul și fixați cele 4 butoane (butoanele din cutia de piese).
6. Instalați motorul tip navă.

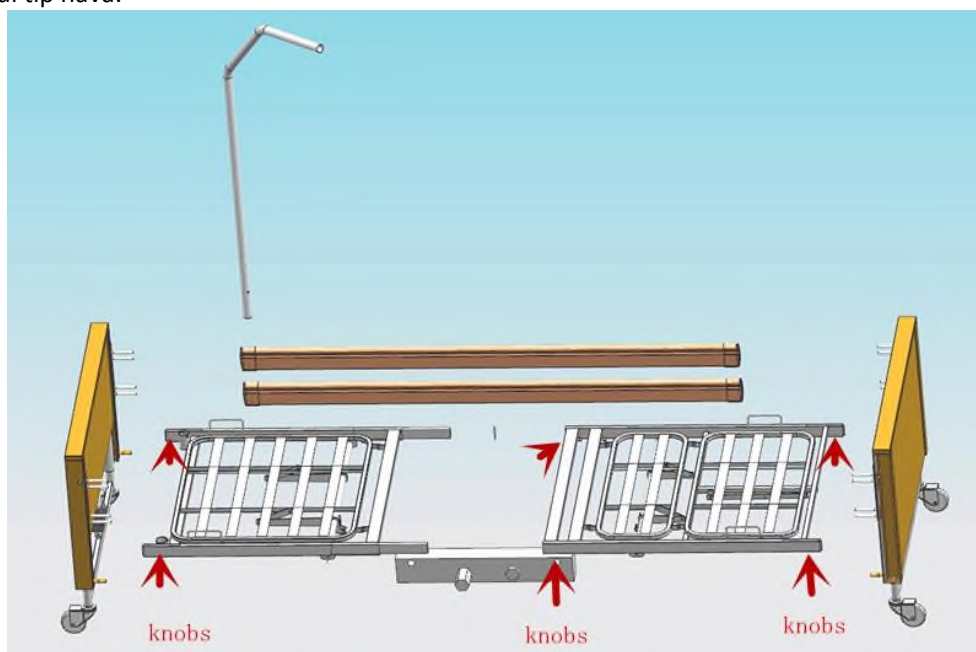

6-1 、 Deschideți capacul motorului pe ambele părți.



6-2 、 Conform direcției, poziționați motorul central sub suprafața patului.



Back



Leg


7. Conectați motorul spătarului .



8. Introduceți tijă de ridicare (buclele din cutia de piese) .



9. Instalați șina laterală din aluminiu și fixați șurubul de limitare.

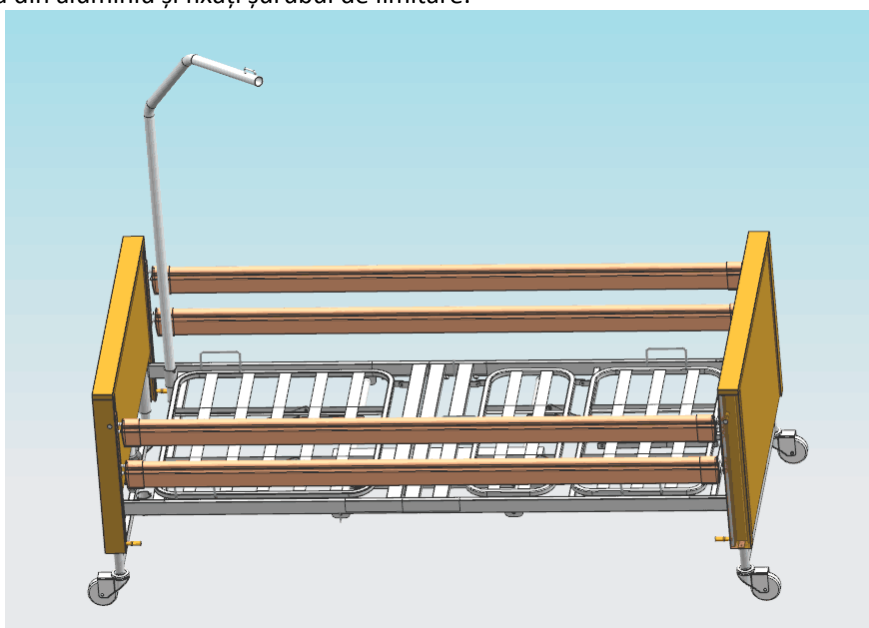

- 9-1 、 Instalați șina laterală din aluminiu.



9-2 、 Fixați șurubul de limitare.



9-3、 Folosiți șina laterală.

Ridicați șina laterală, fixați-o, folosiți-o



Coborâți șina laterală, limitați-o, folosiți-o



10. Conectați la curent.

11. Dezactivați blocarea controlerului pentru cap

12.Operații

12-1 、 Telecomanda

①、 Putere

②、 Spate sus / jos

③、 Picioare sus / jos

④、 Spate + Picioare sus / jos

⑤、Per total sus / jos

⑥、Înclinare

12-2、Frâne



13. Puteți folosi patul așa cum vă doriți.

Notă:

Acest manual descrie utilizarea de zi cu zi.

Aceste instrucțiuni sunt destinate utilizatorului și dealerului specializat.

Patul este livrat complet asamblat de către dealerul dumneavoastră specializat.

Instrucțiunile destinate dealerului specializat explică cum să montați patul.

AVERTISMENT: Evitați prinderea cablurilor de rutare ale altor echipamente între părțile patului medical.

AVERTISMENT: Patul medical trebuie utilizat numai cu un ridicător care poate fi poziționat sub spațiul limitat al patului.