

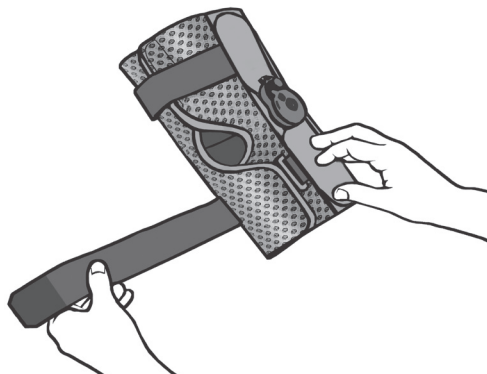


KOD KATALOGOWY	AM-DOSK-O/1R
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA KOŃCZYNY DOLNEJ
MODEL	AM-DOSK-O/1R
CODE	AM-DOSK-O/1R
TRADE NAME	LOWER-EXTREMITY SUPPORT
MODEL	AM-DOSK-O/1R

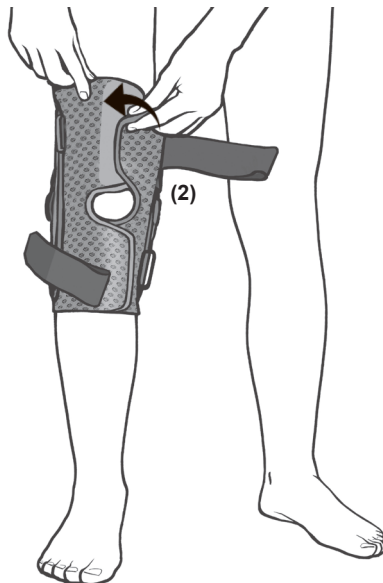



1. **PL:** Wypłec paski z klamerek i rozepnij ortezę.

EN: Remove the straps from the buckles and unfasten of the orthosis.

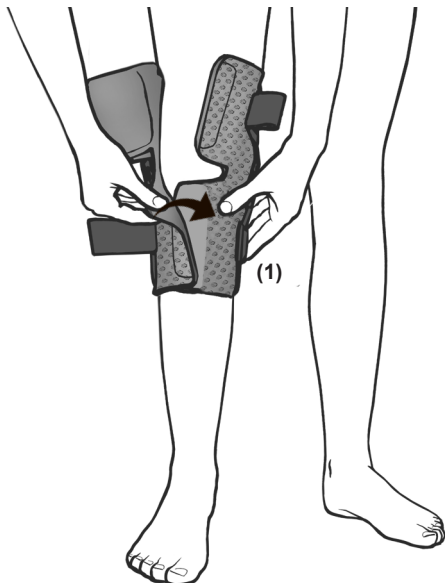



2. **PL:** Załóż ortezę na nogę i zapnij rzepy według numeracji (1) (2).

EN: Put on the orthosis on the leg and fasten the Velcro straps according to the following steps: (1) and (2).

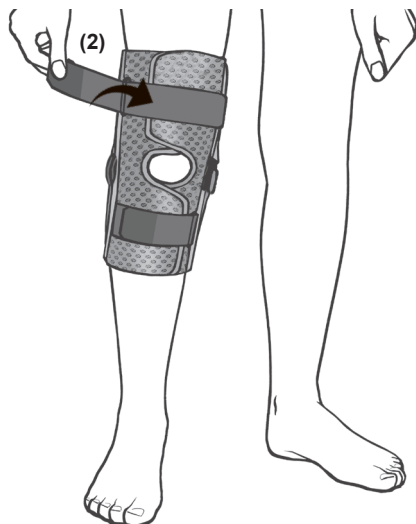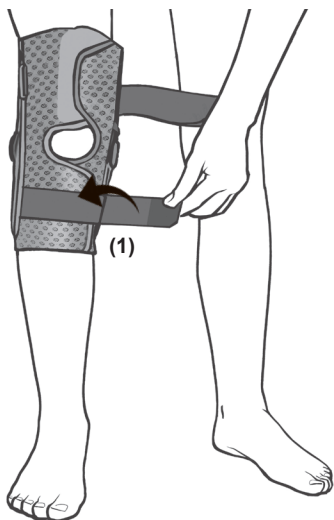

3. PL: Przepleć dolny pasek przez klamerkę i zapnij na rzep (1). Zapnij tak samo pasek górny (2).

EN: Interlace the lower strap through the buckle and fasten with Velcro (1). Fasten the upper strap (2) in the same way.

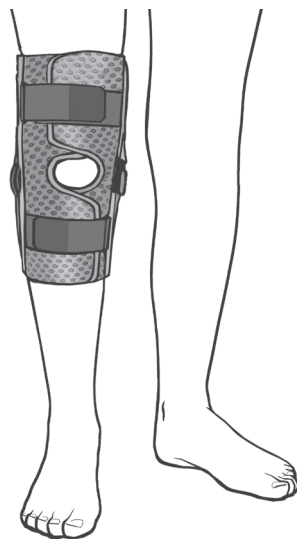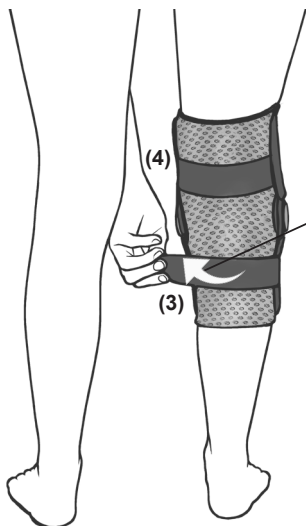

4. PL: Zapnij taśmy na rzep (3 i 4). Jeśli istnieje potrzeba, odetnij zbędną długość taśm.

EN: Fasten the tapes with Velcro (3 and 4). Cut the needless part of tapes off if you need.

5. PL: Gotowy wyrób.

EN: Product is ready to use.