

Booster Car Seat™

Ghid de utilizare

UM-BCS-08-19LIT

Fabricat în SUA



⚠ ATENȚIE

Citiți instrucțiunile înainte de utilizare!

Păstrați acest manual de utilizare pentru referințe viitoare.

Acest produs NU este un scaun auto tip booster certificat în Europa sau Canada.



Cuprins

Ce este Special Tomato™?	3
Povestea din spatele brandului	3
Informații privind siguranța vehiculului	4
Informații privind siguranța vehiculului	4
Piese și componente	7
Instalarea centurii LATCH în vehicul	7
Reglarea hamului de poziționare în 5 puncte	8
Fixarea copilului pentru transport în autovehicul	9
Poziționarea cataramii centurii de siguranță a vehiculului:	10
Instalare în aeronavă	10
Instrucțiuni de instalare în aeronavă	10
Îndepărtarea hamului toracic și a centurii pentru umeri	10
Îndepărtarea hamului pelvian	11
Informații pentru consumatori	11
Utilizare alternativă a scaunului auto Booster: Scaun de poziționare	11
Garanție limitată	12
Îngrijire și curățare	12
Serviciu clienți	12

Serviciu Clienți
Contactați dealerul dumneavoastră direct
—sau—
Special Tomato® Customer Service
Phone: 315-429-8407
Fax: 315-429-8862
Email: customerservice@specialtomato.com
Web: www.specialtomato.com

Înainte de a contacta Serviciul Clienți:

Vă rugăm să furnizați următoarele informații pentru a vă putea asista mai eficient:

Număr de serie (se află pe eticheta laterală):

Model:

Scaunele pentru copii pot fi rechemate din motive de siguranță. Trebuie să înregistrați acest scaun pentru a fi contactat în cazul unei rechemări. Trimiteți numele, adresa, adresa de e-mail (dacă este disponibilă), precum și numărul de model și data fabricației scaunului la:

Bergeron by Design
15 South Second Street
Dolgeville, NY 13329

Pentru informații despre rechemări, sunați la linia telefonică pentru siguranța vehiculelor a guvernului SUA la 1-888-327-4236 (TTY: 1-800-424-9153), sau accesați <http://www.NHTSA.gov>

Data achiziției:

Notă: Informațiile conținute în acest document pot fi modificate fără notificare prealabilă. Utilizați numai accesorii și piese Special Tomato pe produsele Special Tomato. Piese Special Tomato nu sunt compatibile cu produsele altor producători. Înlocuiți imediat orice piesă uzată pentru siguranța dumneavoastră. ©Copyright Bergeron Healthcare. Toate drepturile rezervate.

Notă: Produsele Special Tomato™ nu conțin latex.

Notă: Toți utilizatorii TREBUIE să citească și să înțeleagă acest Manual de utilizare înainte de a folosi produsul. Pentru a asigura o utilizare corectă pe termen lung, păstrați Manualul de utilizare în buzunarul pentru manual de pe spatele scaunului auto tip booster.

Ce este Special Tomato™?

Povestea din spatele brandului

Special Tomato™ este cea mai recentă linie de produse a lui Tim Bergeron. El are peste 40 de ani de experiență în proiectarea, construirea și vânzarea de echipamente de poziționare adaptivă, inclusiv în calitate de designer inițial al liniei de produse Tumble Forms®. Tim a combinat experiența sa în design cu un nou proces de fabricație care oferă perne moi, durabile și impermeabile pentru poziționarea copiilor cu nevoi speciale.

Poate vă întrebați: „Ce e atât de special la roșii?” Tim este prezentat aici alături de fiica lui cea mai mică, Carrie, o tânără adultă cu sindrom Down. Povestea lui Carrie, „Special Tomato”, rezumă ceea ce Tim crede că simt majoritatea părinților în legătură cu copilul lor cu nevoi speciale.

„Fiecare copil este special în felul său unic. Este responsabilitatea părinților să găsească modalități de a sprijini dezvoltarea copilului lor într-un mod care să-l includă în mod egal în familie și comunitate.” Pentru copiii cu dizabilități fizice, echipamentele adaptive pot juca un rol important în ajutarea lor de a-și atinge cel mai înalt nivel de funcționare.

„Special Tomato” pe tufa Bergeron

Tatăl și mama mea au avut patru copii. Primii trei copii erau sănătoși și normali. Apoi am venit eu, un bebeluș diferit, cu sindrom Down. Am avut un orificiu la inimă, o valvă cardiacă afectată, icter, un limbaj mare și capul instabil. Pe măsură ce am crescut, am realizat și că învăț mai greu. Într-o zi, mă deranja că îmi era greu să-mi fac temele. I-am spus tatălui meu despre această problemă și el mi-a împărtășit o poveste despre când era în grădina lui și culegea roșii în anul în care m-am născut. În fiecare an, tatăl meu își face o grădină și îi place să planteze roșii.

La vremea recoltei, pe o tufă erau roșii Beefsteak. Când a văzut o roșie cu formă diferită, i-a atras atenția. Avea o parte mare, netedă, roșie și mărită, care l-a făcut să vrea să o ridice și să studieze bump-ul pentru că era atât de unică și arăta apetisant. La cină, acea roșie era la fel de succulentă ca celelalte. Chiar dacă sunt diferită, ca roșia, ca persoană cu sindrom Down, familia și prietenii mei mă iubesc și mai mult și vor să mă ajute când am nevoie. Tatăl meu îmi spune că, deși învăț mai greu decât frații mei, personalitatea mea iubitoare și deschisă și caracterul meu puternic mă fac la fel de specială ca ei. Cred că sunt „roșia specială” pe tufa familiei noastre!

— Carrie Bergeron



Fotografie de familie Bergeron (de la stânga la dreapta): Peggy, Tim și Carrie Bergero

Informații privind siguranța vehiculului

Informații privind siguranța vehiculului

Nerespectarea tuturor instrucțiunilor scrise și a etichetelor produsului poate duce la deces sau răni grave în caz de accident. Citiți și înțelegeți cu atenție acest Manual de utilizare înainte de a folosi produsul. Dacă aveți întrebări, vizitați SpecialTomato.com sau contactați Bergeron Healthcare. Pentru a asigura o utilizare corectă pe termen lung, păstrați Manualul de utilizare în buzunarul pentru manual situat pe spatele scaunului auto tip booster.

Utilizați scaunul auto tip booster MIC numai pentru copii cu înălțimea între 102 cm (40 inchi) și 142 cm (56 inchi) și cu greutatea între 23 kg (51 lbs) și 41 kg (90 lbs).

Utilizați scaunul auto tip booster MARE numai pentru copii cu înălțimea între 127 cm (50 inchi) și 165 cm (65 inchi) și cu greutatea între 37 kg (81 lbs) și 59 kg (130 lbs).

AVERTISMENT: Hamul de poziționare cu 5 puncte NU este un ham de siguranță și NU este un dispozitiv de reținere sigur pentru copil. Un copil care folosește acest scaun auto tip booster TREBUIE să fie reținut corect cu centura de siguranță a vehiculului, atât pe șold, cât și pe umăr, conform acestui Manual de utilizare.

Sistemul LATCH este întotdeauna necesar atunci când se utilizează scaunul auto tip booster într-un vehicul.

Utilizați scaunul auto tip booster doar în poziție orientată înainte.

NU utilizați NICIODATĂ scaunul auto tip booster doar cu centura de șold a vehiculului pentru a reține copilul (Figura 1). Aceasta poate duce la răni grave sau decesul copilului.

(Figura 1) INCORECT



(Figura 2) CORECT



UTILIZAȚI ÎNTOTDEAUNA centura de șold și centura de umăr a vehiculului atunci când rețineți copilul în scaunul auto tip booster (Figura 2).

NU utilizați NICIODATĂ hamul de poziționare cu 5 puncte fără centura de șold și centura de umăr a vehiculului pentru a reține copilul. Aceasta poate duce la răni grave sau decesul copilului.

Unele sisteme de centuri de șold și umăr ale vehiculului nu pot fi utilizate cu acest scaun auto tip booster. Citiți manualul de utilizare al vehiculului și secțiunea „Compatibilitatea centurilor vehiculului” din acest manual.

NU utilizați acest scaun auto tip booster cu niciun alt spătar sau pernă.

VERIFICAȚI ÎNTOTDEAUNA că scaunul auto tip booster este fixat corect în vehicul ÎNAINTE de a așeza copilul în scaun.

Hamul de poziționare cu 5 puncte trebuie ajustat pentru a se potrivi diferitelor haine (de exemplu, haine de iarnă vs. haine de vară).

Pentru a evita răniri din cauza unor deteriorări ascunse, întrerupeți utilizarea scaunului auto tip booster după zece ani sau dacă a fost implicat într-un accident.

Nu demontați și nu modificați scaunul auto tip booster în niciun fel, cu excepția pașilor descriși în acest Manual de utilizare.

Nu lăsați copiii să se joace cu scaunul auto tip booster.

Nu puneți nimic între scaunul vehiculului și scaunul auto tip booster pentru a ridica înălțimea acestuia. În caz de accident, obiectul poate aluneca și poate afecta stabilitatea scaunului.

Protecția principală a ocupanților vehiculului provine de la vehiculul însuși în caz de accident. Scaunul auto tip booster nu va proteja complet un copil în cazul unui impact puternic. Rolul scaunului auto tip booster, atunci când este instalat corect, este de a îmbunătăți semnificativ șansele de supraviețuire în majoritatea accidentelor.

NU transportați scaunul auto tip booster de hamul de 5 puncte, pentru a evita deteriorarea.

Nu lăsați niciodată un copil singur într-un vehicul, nici măcar pentru scurt timp.



AVERTISMENT: NU plasați un scaun pentru copii pe locul din față al vehiculului dacă airbag-ul pasagerului este activ, cu excepția cazului în care airbag-ul este dezactivat. DECESUL sau RĂNIREA GRAVĂ pot avea loc. Locul din spate este cel mai sigur pentru copiii sub 12 ani.

Asigurați întotdeauna scaunul auto tip booster folosind centurile de șold și de umăr ale vehiculului și ancorele LATCH, chiar și atunci când nu este ocupat. În caz de accident, un obiect nefixat poate provoca răniri altor ocupanți ai vehiculului.

Înregistrați scaunul auto tip booster la producător.

Nu lăsați scaunele rabatabile ale vehiculului neblocați. În cazul unei opriri bruște, spătarul liber al scaunului poate împiedica scaunul auto tip booster să protejeze copilul conform intenției.

Urmăriți toate instrucțiunile de pe scaunul auto tip booster și din acest Manual de utilizare. Pentru a asigura o utilizare corectă pe termen lung, păstrați Manualul de utilizare în buzunarul pentru manual situat pe spatele scaunului auto tip booster.

Conform statisticilor privind accidentele, Administrația Națională pentru Siguranța Traficului Rutier (NHTSA) recomandă părinților să aleagă locul din spate ca fiind cel mai sigur pentru instalarea corectă a unui scaun auto tip booster. Citiți cu atenție secțiunea privind centurile vehiculului din acest ghid pentru a asigura siguranța copilului. Dacă aveți dubii privind instalarea scaunului, consultați manualul de utilizare al vehiculului.

Dacă copilul nu va menține centurile de șold și de umăr ale vehiculului poziționate corect în permanență, NU utilizați scaunul auto tip booster.

Înălțimea maximă a ocupantului: Copilul este prea înalt dacă partea superioară a urechilor sale depășește partea superioară a spătarului scaunului auto tip booster.

Evitați expunerea prelungită la soare a scaunului auto tip booster. Acoperiți scaunul pentru a preveni supraîncălzirea suprafeței scaunului sau a centurilor pentru utilizare sigură.

Când nu este utilizat, păstrați scaunul auto tip booster într-un loc sigur și uscat. Nu puneți obiecte grele pe scaun în timpul depozitării și nu îl păstrați lângă surse de căldură directă.

Asigurați-vă întotdeauna că scaunul vehiculului este blocat în poziție verticală. Rabatarea scaunului vehiculului poate afecta negativ siguranța și performanța scaunului auto tip booster în caz de accident.

Scaunul auto tip booster corespunde tuturor cerințelor standardului federal pentru siguranța vehiculelor (FMVSS) 213. Acest dispozitiv de reținere este certificat pentru utilizare în vehicule și aeronave.

Compatibilitatea cu centurile vehiculului

AVERTISMENT: Utilizați scaunul auto tip booster DOAR cu centura de siguranță a vehiculului cu 3 puncte (șold și umăr) care NU este motorizată și nu are puncte de ancorare pe ușa vehiculului.

- Pentru a proteja copilul în caz de accident, scaunul auto tip booster trebuie utilizat **DOAR cu o centură de siguranță compatibilă**.
- Următoarele tipuri de centuri **NU sunt compatibile** cu scaunul auto tip booster:
 1. Centură cu 2 puncte, de orice fel.
 2. Centură cu 3 puncte cu retractor separat pentru secțiunile de șold și umăr.
 3. Centură motorizată, automată.
 4. Centură cu puncte de ancorare pe ușă.

Notă: Manualul de utilizare al vehiculului oferă informații complete despre tipurile de centuri din vehicul. Dacă tipul de centură nu este compatibil, alegeți o altă poziție în vehicul.

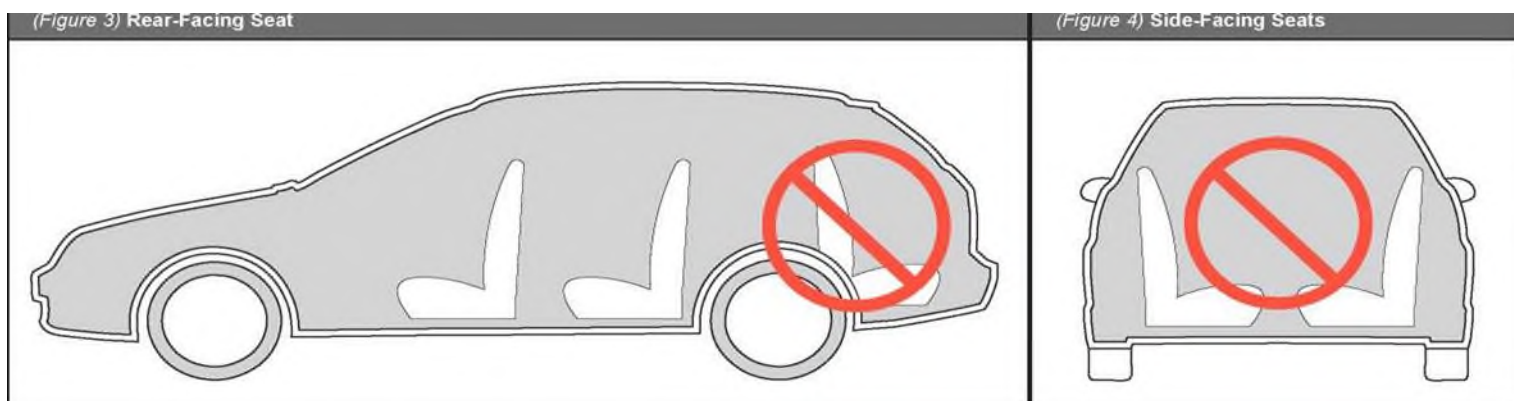
Pozițiile scaunelor în vehicul

IMPORTANT: Unele vehicule nu oferă poziții de scaun compatibile cu scaunele auto tip booster. În caz de îndoială, contactați producătorul vehiculului pentru asistență.

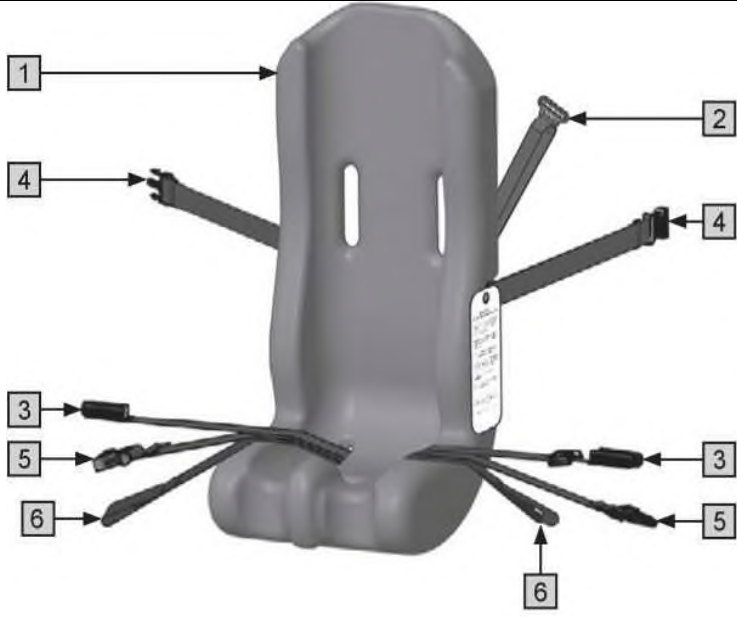
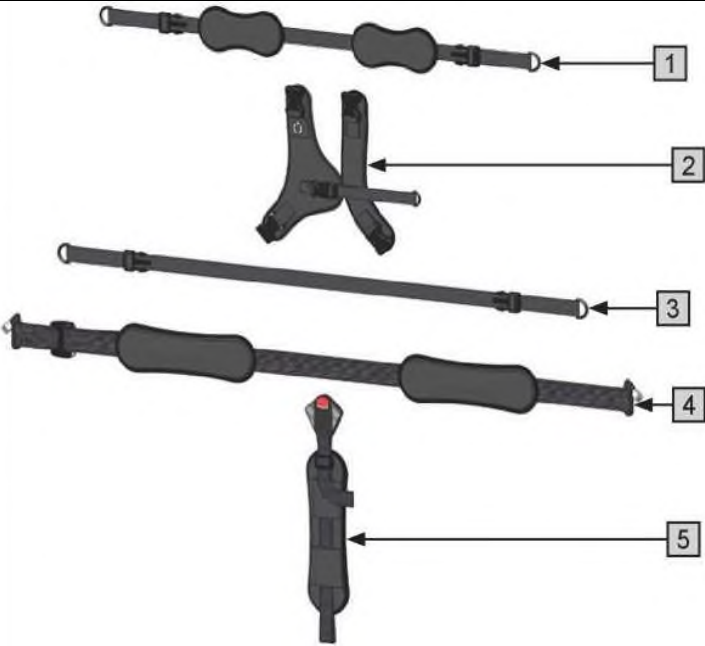
Bergeron Healthcare și Departamentul de Transport al SUA avertizează că copiii sub 12 ani trebuie să stea pe locurile din spate și să fie departe de airbag-urile frontale. Singura excepție este dacă airbag-ul este dezactivat. Când utilizați scaunul auto tip booster într-un vehicul cu airbag-uri, consultați manualul vehiculului pentru instrucțiuni și precauții suplimentare privind instalarea scaunului booster.

AVERTISMENT: Utilizați scaunul auto tip booster DOAR pe scaune orientate înainte.

- **NU utilizați scaunul auto tip booster pe scaune orientate cu spatele la direcția de mers** în niciun vehicul (Figura 3).
- **NU utilizați scaunul auto tip booster pe scaune orientate lateral** în niciun vehicul (Figura 4).



Piese și componente

(Figura 5) Scaun Auto Booster	(Figura 6) Ham de poziționare cu 5 puncte
	
(Figura 5) Scaun Auto Booster	(Figura 6) Ham de poziționare cu 5 puncte
1. Scaun Auto Boster	1. Centura de umăr și pernute
2. Ghidaj pentru centura de umăr	2. Pernutele centurii toracice
3. Centura LATCH (nemontabilă)	3. Centura inferioară a centurii toracice
4. Centura superioară de prindere a scaunului (nemontabilă)	4. Centura pelviană cu pernă și hamul pelvian
5. Centura inferioară de prindere a scaunului	5. Centura pelviană între picioare cu pernă
6. Centura de prindere pentru aeronave	

Vă rugăm să completați astăzi cardul de înregistrare și să-l trimiteți prin poștă!

Un sistem de restricție pentru copii poate fi rechemat din motive de siguranță în orice moment. În cazul unui astfel de recall, putem să vă contactăm doar dacă avem numele și adresa dumneavoastră, așadar vă rugăm să trimiteți astăzi cardul de înregistrare pentru a fi pe lista noastră de notificări.

Acest sistem de restricție este certificat pentru utilizare în autovehicule și aeronave.

Consultați cerințele privind înălțimea și greutatea ocupantului pentru scaunul auto tip booster pentru a determina mărimea corespunzătoare a scaunului pentru ocupant:

Cerințe de înălțime și greutate pentru ocupant – Scaun auto tip booster		
	SMALL Booster Car Seat	LARGE Booster Car Seat
Interval înălțime ocupant	40 - 56 in (102 -142 cm)	50 - 65 in (127 -165 cm)
Interval greutate ocupant	51 - 90 lbs. (23 - 41 kg)	81 - 130 lbs. (37 - 59 kg)

Instalarea centurii LATCH în vehicul

1. Verificați dacă vehiculul dumneavoastră este echipat cu ancore (Figura 1) Ancorele LATCH

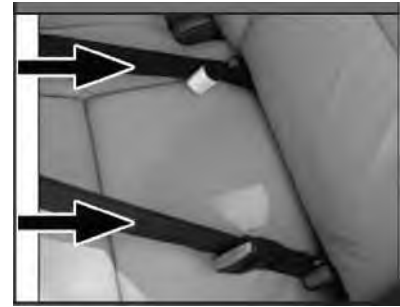
LATCH (Figura 7). Consultați manualul de utilizare al vehiculului pentru a localiza poziția exactă a ancorelor LATCH.

2. Înainte de a instala scaunul auto tip booster în vehicul, asigurați-vă că hamul de poziționare în 5 puncte este instalat corect pe scaunul booster.

3. Instalați scaunul booster folosind centura LATCH, cuplând ambele cataramăle ale centurii LATCH în ancorele LATCH ale vehiculului până când auziți un clic audibil de la fiecare cataramă (Figura 8).

4. Aplicați greutate pe scaunul booster, sprijinindu-vă genunchiul pe suprafața scaunului, apoi trageți ferm de centura de reglare LATCH până când se elimină orice slăbiciune.

AVERTISMENT: Obiectele nefixate se pot transforma în proiectile și pot provoca răni grave într-un accident. Asigurați-vă întotdeauna că scaunul booster rămâne fixat în vehicul prin sistemul de ancorare LATCH, chiar și atunci când scaunul nu este utilizat. Sistemul LATCH trebuie folosit întotdeauna când scaunul booster este utilizat.



(Figura 8) Cataramele centurii LATCH



Reglarea hamului de poziționare în 5 puncte

AVERTISMENT: Hamul de poziționare în 5 puncte **NU** este un ham de siguranță și este utilizat doar pentru a poziționa confortabil copilul în scaunul booster. Când folosiți scaunul booster într-un autovehicul, copilul **TREBUIE ÎNTOTDEAUNA** să fie fixat corespunzător cu centura de siguranță în 3 puncte (centură pelviană și centură de umăr) a vehiculului, conform acestui manual de utilizare.

(Figura 9) ham de poziționare în 5 puncte



Folosiți pernuțele pentru centura de umăr pentru a împiedica frecarea plasticului cataramelor de gâtul și fața copilului.

Pentru a asigura o poziționare corectă a hamului toracic, verificați ca centura toracică să fie așezată în mijlocul pieptului copilului.

Lungimea centurii pelviene de talie poate fi ajustată ușor prin apăsarea tablei gri de reglare și ajustarea lungimii centurii pentru a se potrivi confortabil (Figura 10).

Catarama hamului pelvian are un buton de eliberare rapidă care deblochează ambele centuri de talie de pe centura dintre picioare, oferind acces rapid și ușor la la copil. Ambele cleme masculine ale centurii de talie trebuie să fie cuplate între ele înainte de a fi introduse în catarama hamului pelvian (Figura 11).

Reglați lungimea centurii dintre picioare astfel încât centura pelviană să fie poziționată pe pelvis, prevenind astfel așezarea acesteia pe abdomenul inferior.

(Figura 10) Centura de talie cu mecanism de ajustare	(Figura 11) Cataramă pentru ham pelvin
	

Fixarea copilului pentru transport în autovehicul

1. Înainte de a fixa copilul pentru transport în autovehicul, citiți și parcurgeți instrucțiunile din cele două secțiuni anterioare: „Instalarea centurii LATCH a vehiculului” și „Reglarea hamului de poziționare în 5 puncte”.

2. Asigurați-vă că copilul este poziționat corect în scaunul auto Booster cu hamul de poziționare în 5 puncte (Figura 9).

3. Prindeți centura de siguranță a vehiculului cu 3 puncte (pe șold și umăr) peste copil. Centura de șold a vehiculului trebuie să stea plat pe șoldurile copilului (Figura 12).

4. Treceți centura de umăr a vehiculului prin ghidajul centurii de umăr al scaunului Booster (plastic roșu). Notă: ghidajul centurii de umăr al scaunului Booster trebuie utilizat pe partea opusă a cataramei centurii vehiculului (vedeți Figura 12).

5. Reglați ghidajul centurii de umăr al scaunului Booster la nivelul umerilor copilului (Figura 13). Asigurați-vă că centura de umăr a vehiculului stă plat pe umărul copilului și nu atinge gâtul copilului.

6. AVERTISMENT: Dacă centura de siguranță cu 3 puncte a vehiculului nu este poziționată corect, scaunul Booster nu este instalat corespunzător:

7. Centura de umăr a vehiculului trebuie să stea plat pe umărul copilului și să nu atingă gâtul copilului.

8. Centura de șold cu 3 puncte a vehiculului trebuie poziționată cât mai în față și jos peste pelvisul copilului, atingând partea superioară a coapsei.

9. Verificați siguranța copilului prin asigurarea faptului că nu există joc în sistemul centurii de șold și de umăr al vehiculului.

10. Confirmați că catarama centurii de siguranță a vehiculului este în poziția corectă (vedeți secțiunea „Poziționarea cataramei centurii de siguranță a vehiculului”).

(Figura 12) Fixați Scaunul Auto Booster



(Figura 13) Poziția ghidajului centurii de umăr



Poziționarea cataramii centurii de siguranță a vehiculului:

IMPORTANT: După instalarea scaunului înălțător pentru mașină și fixarea centurii de siguranță cu prindere în 3 puncte a vehiculului în jurul copilului, este important să se verifice poziția corectă a cataramii centurii pentru a asigura o instalare sigură.

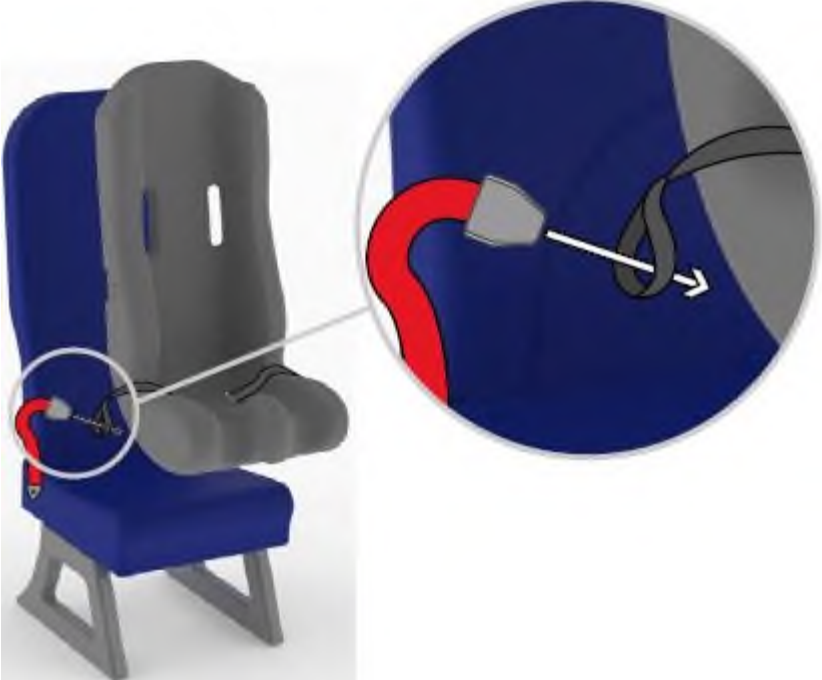
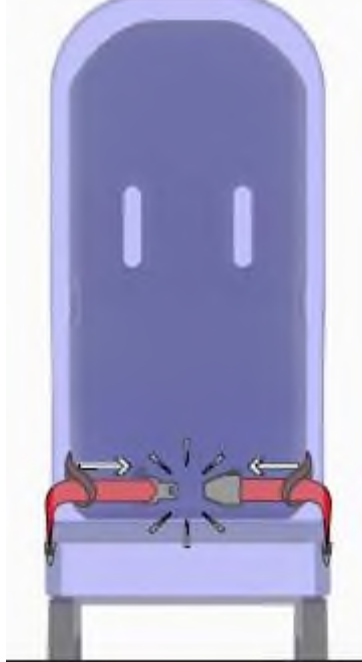
CORECT: Dacă poziția cataramii centurii de siguranță a vehiculului este adiacentă șoldului copilului.

INCORECT: Dacă copilul nu este fixat cu centura de siguranță cu prindere în 3 puncte a vehiculului și/sau cu scaunul înălțător pentru mașină, conform celor menționate mai sus.

Instalare în aeronavă

Instrucțiuni de instalare în aeronavă

1. Scaunul auto înălțător trebuie utilizat doar pe scaunele orientate spre direcția de mers ale aeronavei.
2. Se recomandă ca scaunul auto înălțător să fie instalat pe un loc de la geam, pentru a evita blocarea accesului la culoar.
3. Vă rugăm să contactați compania aeriană cu care veți călători înainte de zbor pentru a vă informa cu privire la politicile specifice ale companiei și la dimensiunile scaunelor din aeronavă.

PASUL 1	PASUL 2
	
Ghidează fiecare centură de siguranță a avionului prin buclele de pe curea de prindere a scaunului Booster pentru avion. Centura avionului trebuie să treacă ÎN SPATE față de scaunul Booster.	Fixează centura de siguranță a avionului în spatele scaunului auto suplimentar (Booster). Apoi, aplică presiune pe scaunul Booster punând genunchiul pe suprafața scaunului, apoi trage centura de siguranță a avionului pentru a fixa corect scaunul Booster în avion

Îndepărtarea hamului toracic și a centurii pentru umeri

PASUL 1	PASUL 2	PASUL 3
		
Deprinde centura toracică de pe ambele centuri pentru umeri. Scoate centurile pentru umeri prin decupajele din pernă pentru umeri. Notă: Te rugăm să scoți Manualul de utilizare imprimat din buzunarul pentru manual înainte de a spăla centurile. Reinstalează buzunarul pentru manual după spălare.	Deprinde centura toracică de pe ambele centuri inferioare ale hamului toracic. Scoate centura toracică.	Scoate centurile inferioare ale hamului toracic prin decupajele din pernă pentru talie

Îndepărtarea hamului pelvian

PASUL 1	PASUL 2	PASUL 3
		
Îndepărtează cele 3 benzi cu arici (Velcro) de pe hamul pelvin. Apasă butonul roșu de pe catarama hamului pelvin pentru a elibera centurile de talie din centura dintre picioare.	Întoarce scaunul auto Booster cu fața în jos și ghidează clipsul de talie prin decupajul pentru talie al pernei. Apoi, trece clipsul de talie prin bucla centurii dintre picioare.	Răstoarnă scaunul auto Booster la loc și continuă să treci centura de talie în sus prin decupajul pentru talie al pernei. Scoate centura dintre picioare

Informații pentru consumatori

Utilizare alternativă a scaunului auto Booster: Scaun de poziționare

Scaunul auto Booster este conceput și pentru a fi instalat pe un scaun obișnuit de uz casnic, folosind curelele de prindere pentru scaun incluse (Figura 14). Aceasta permite o poziționare corectă și confortabilă a copilului, atât acasă, cât și în timpul călătoriilor.

(Figura 14) Scaun de poziționare: Prinderea pe scaun



Garanție limitată

Vă rugăm să completați și să trimiteți cardul de garanție!

Bergeron Healthcare garantează cumpărătorului inițial al produsului Special Tomato™ că, dacă orice piesă sau componentă se dovedește a fi defectă din cauza materialelor sau a manoperei, în termen de cinci ani de la data achiziției, piesa defectă va fi reparată sau înlocuită, la discreția companiei Bergeron Healthcare, fără niciun cost pentru client. Serviciul de garanție poate fi efectuat de un centru de service autorizat sau, la discreția Bergeron Healthcare, direct de către companie.

Această garanție nu acoperă uzura normală în timp sau daunele cauzate de accidente ori utilizare necorespunzătoare.

Pentru a beneficia de această garanție limitată, clientul trebuie mai întâi să obțină un Număr de Autorizare pentru Returnare (Return Authorization Number) de la distribuitorul de la care a fost achiziționat produsul Special Tomato™. Produsul trebuie returnat cu plata transportului în avans (se recomandă prin UPS) la fabrică sau la un centru de service autorizat, împreună cu o copie a facturii originale, numărul de autorizare pentru returnare și o descriere scrisă a problemei.

Îngrijire și curățare

Produsele Special Tomato™ sunt impermeabile la lichide. Folosiți un detergent sau o soluție de curățare blândă pentru a șterge periodic scaunul. NU scufundați scaunul auto Booster în apă sau în alte lichide de curățare. Centura în 5 puncte a scaunului auto Booster poate fi îndepărtată, spălată în apă rece, dezinfectată și uscată la aer (consultați secțiunea „Centură de poziționare în 5 puncte” pentru informații suplimentare). NU introduceți centura în uscător.

Serviciu clienți

Contactați direct distribuitorul dumneavoastră. Sau...

Serviciul Clienți Special Tomato™:

Telefon: 315-429-8407

Fax: 315-429-8862

Email: customerservice@specialtomato.com

Website: www.specialtomato.com

