

## Instrucțiuni de utilizare

**Saltea de poziționare**  
**Sistemul de stabilizare**



Tip  
Grande  
Grande Armadillo



Vă mulțumim că ați ales produsul nostru. NOEL a proiectat și fabricat salteaua de poziționare Stabilo System conform celor mai înalte standarde de siguranță și funcționalitate. Suntem convinși că produsul nostru va răspunde celor mai exigente cerințe și așteptări ale dumneavoastră. Aceste instrucțiuni de utilizare fac parte integrantă din sistemul de poziționare Stabilo System.

Vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile înainte de a utiliza produsul.

## Sistem de poziționare prin vid pentru stabilizarea trunchiului, capului și membrelor - Saltea Stabilo System

Sistemul de poziționare prin vid Saltea Stabilo System este un produs conceput pentru copii și adulți cu paralizie cerebrală și mielomeningocel, compensând și ameliorând dizabilitatea prin stabilizarea pacientului în poziția de șezut sau culcat. Salteaua Stabilo System este potrivită pentru persoanele cu deformări mari ale corpului, care îngreunează poziționarea corectă în decubit sau șezut, având risc de apariție a escarelor.


### INDICAȚII

- Paralizie cerebrală
- Mielomeningocel
- Deformări ale trunchiului
- Flaciditate
- 

Grande



Grande Armadillo

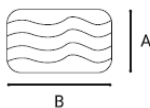

| Tip | Dimensiuni (cm) |     | Înălțimea utilizatorului (cm) |
|-----|-----------------|-----|-------------------------------|
|     | A               | B   |                               |
| M   | 70              | 160 | < 1,25                        |
| M+  | 90              | 200 | >1,25                         |
| L   | 130             | 200 | >1,25                         |
| Tip | Dimensiuni (cm) |     | Înălțimea utilizatorului (cm) |
|     | A               | B   |                               |
| M+  | 90              | 200 | >1,25                         |

## CONTRAINDICAȚII

Greutatea permisă a utilizatorului 80 kg.

## AVERTISMENTE PRIVIND SIGURANȚA PRODUSELOR

- Pentru modelul Grande, nu vă așezați pe un strat de granule prea subțire.
- Este recomandat să folosiți o husă aerisită dacă este necesară o ventilație suplimentară în jurul corpului.
- Evitați contactul cu obiecte ascuțite care pot deteriora salteaua.
- Nu curățați cu soluții pe bază de solvenți, de exemplu toluen sau acetona.
- Nu trageți de supapă.
- Nu supraînflați salteaua. Folosiți doar pompa specială inclusă în pachet pentru umflare.
- Nu călcați salteaua.
- În caz de rupere, microgranulele pot ieși din saltea și pot fi periculoase pentru copiii mici.
- Doar persoanele care au primit instrucțiuni sau instruire pot utiliza dispozitivul.
- Nu utilizați Grande Armadilo în apropierea materialelor inflamabile (apă) sau a focului deschis (aerul pompat în saltea susține focul).
- Păstrați pompa Grande Armadilo departe de alte dispozitive electronice. Totuși, dacă apropierea de alte dispozitive electronice este inevitabilă, asigurați-vă că atât pompa, cât și celelalte dispozitive funcționează corect.
- Schimbați poziția utilizatorului la fiecare 5 ore.

## ATENȚIE

- Grosimea saltelei se poate reduce în mod natural cu 5% în perioada inițială de utilizare
- În cazul unor modificări considerabile ale temperaturii, utilizați din nou pompa pentru a obține o duritate adecvată (temperatura mai ridicată înmoaie salteaua, temperatura mai scăzută întărește salteaua)

## INSTRUCȚIUNI PENTRU UTILIZAREA POMPEI ELECTRICE

1. Scoateți tubul din cutia cu pompă electrică.
2. Desurubați capacul supapei, înșurubați tubul (partea filetată) în supapa saltelei și introduceți celălalt capăt al tubului în mufa SOFT a pompei electrice. Porniți pompa și așteptați până când salteaua devine suficient de moale, apoi

opriți pompa.

3. Începeți să modelați salteaua (fie manual pentru a ajusta forma, fie prin așezat sau sprijinire pe aceasta).
4. Schimbați poziția tubului de la SOFT la HARD și porniți pompa pentru a elimina aerul până când se atinge duritatea dorită.
5. Desurubați tubul, puneți capacul la loc și strângeți-l.
6. Pentru a schimba forma, repetați pașii de la 2 la 5.



## INFORMAȚII SUPLIMENTARE PENTRU GRANDE ARMADILO


Grande Armadilo este compus din:

1. Salteaua Grande
2. Inserția pentru reducerea presiunii
3. Husa din membrană



## INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE:

1. Modelați salteaua pentru a se potrivi nevoilor utilizatorului.
2. Plasați inserția pentru reducerea presiunii pe pat, pe Stabilo Grande (soclurile saltei trebuie să fie aproape de picioarele utilizatorului și să fie orientate în sus).
3. Trageți elasticele sub saltea și fixați clipsurile.
4. Așezați pompa pe o suprafață plană sau agățați-o pe un perete sau pat. Conectați pompa la soclurile pentru aer și verificați calitatea și fermitatea conexiunilor.
5. Puneți comutatorul verde pe poziția ON. Salteaua va fi gata de utilizare după 20 de minute; odată umflată, reglați presiunea din bulele inserției folosind butonul, conform cerințelor utilizatorului SOFT/HARD.
6. Întindeți husa peste inserție (partea mată în sus, membrana în jos). Așezați utilizatorul pe saltea.

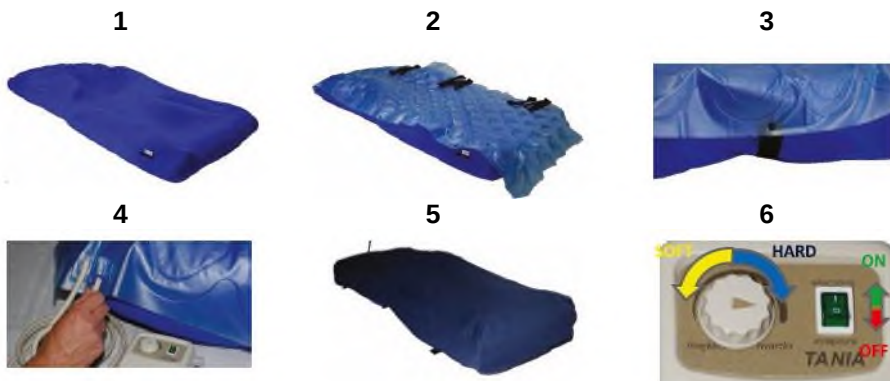

## ÎNTREȚINERE

- Verificați în mod regulat starea produsului – acordați atenție eventualelor crăpături sau rupturi.
- Înșurubați capacul supapei înainte de spălare.
- Spălați manual salteaua sub jet de apă, folosind un detergent obișnuit, de exemplu detergent de vase.
- Poate fi spălată în mașina de spălat la un ciclu de 40°C – este suficient balsamul de rufe, nu este necesară folosirea detergentului pudră.
- Ștergeți și uscați cu un prosop de hârtie.
- Pot fi folosite dezinfectantele standard utilizate în spitale.
- Nu folosiți soluții de curățare pe bază de solvenți, cum ar fi toluenul sau acetona.

## GARANȚIE

- Garanția este oferită pentru o perioadă de 24 de luni.
- Garanția nu acoperă deteriorările mecanice ale saltelei de poziționare Stabilo System.
- În caz de nelămuriri, vă rugăm să contactați direct vânzătorul sau producătorul.
- Raportați orice incident direct vânzătorului sau producătorului.

## DECLARAȚIA DE CONFORMITATE

Dispozitivul medical Salteaua de poziționare Stabilo System respectă cerințele esențiale ale Directivei 93/42/CEE.



NOEL s.c.

str. Romanowicz, nr. 6, 30-702 Krakow

+ 48 12 341 53 16

[www.stabilo.krakow.pl](http://www.stabilo.krakow.pl)

[stabilo@stabilo.krakow.pl](mailto:stabilo@stabilo.krakow.pl)



Poduszki Stabilo/Stabilo Cushions



stabilocushions-official



stabilo cushion



Nr. doc. IU/MSS 2.1-PL/EN

Ed. 2 /2019

actuală până 03.05.2021