

Manual de utilizare



Dispozitiv electric pentru urcarea scărilor - DW-11C

Pregătirea dispozitivului electric pentru urcat scări pentru utilizare

Verificarea nivelului de încărcare a bateriei

1. Fie pe dispozitivul electric pentru urcat scări, fie după ce a fost îndepărtat, întoarce cheia bateriei complet în sensul acelor de ceasornic.

2. Apasă butonul roșu și luminile verzi se vor aprinde dacă există încărcătură în baterie.

- 1 lumină = 25% încărcată
- 2 lumini = 50% încărcată
- 3 lumini = 75% încărcată
- 4 lumini = 100% încărcată




Încărcarea bateriei: pe dispozitivul electric pentru urcat scări

3. Desurubează cablul de conexiune al bateriei în sensul invers acelor de ceasornic.



4. Conectează cablul încărcătorului și încarcă bateria.
5. Când bateria este încărcată, îndepărtează cablul de încărcare, reconectează cablul de conexiune și înșurubează-l manual, în sensul acelor de ceasornic.

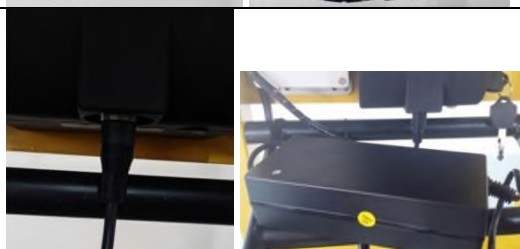

Încărcarea bateriei: îndepărtarea de pe dispozitivul electric pentru urcat scări

6. Desurubează cablul de conexiune al bateriei în sensul invers acelor de ceasornic.



7. Trage în jos mânerul din față al bateriei. 8. Întoarce cheia complet în sensul acelor de ceasornic și trage ușor bateria înainte pentru a o îndepărta.	
9. Conectează cablul încărcătorului și încarcă bateria. 10. Când bateria este încărcată, îndepărtează cablul de încărcare, reconectează cablul de conexiune și înșurubează-l manual, în sensul acelor de ceasornic.	

Extinderea mânerului de operare

14. Întoarce butonul roșu în sensul acelor de ceasornic și ridică mânerul în sus, permițându-i să se blocheze în poziție. În funcție de înălțimea operatorului, se pot selecta două înălțimi.



Extinderea șinelor

Apasă bara inferioară cu săgeata roșie înainte, în direcția săgeții. Acest lucru va elibera mecanismul de blocare al șinelor.



15. Trage bara superioară a șinelor înapoi până când șinele se blochează în a doua poziție de blocare.



Aplicarea frânelor

16. Apasă ferm cu piciorul clapeta roșie a mecanismului de frânare pentru a activa frâna.




Glisarea reglabilă


17. Partea inferioară a glisierii este reglabilă pentru a se mișca spre dreapta și stânga.


18. Apucă catarama cu degetele pentru a o trage în afară.

19. Cu cealaltă mână, trage glisiera în afară sau împinge-o înapoi pentru a o ajusta la dimensiunea scaunului rulant.

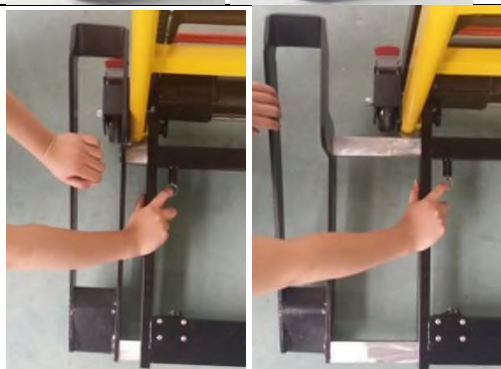

20. Un deget al unei mâini apucă catarama pentru a o trage în afară. Cu cealaltă mână, trage glisiera superioară în afară sau împinge-o înapoi pentru a o ajusta la dimensiunea scaunului rulant.

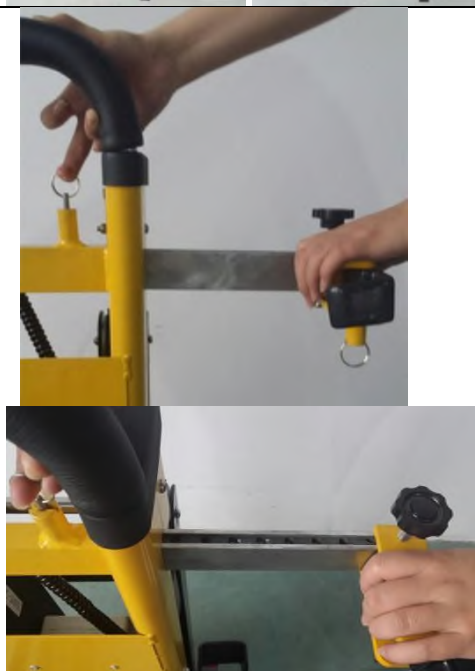

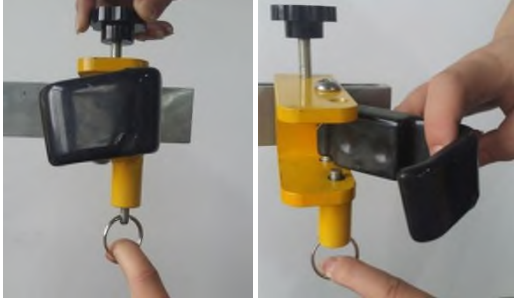21. Reglează prinderea de blocare pentru a se potrivi cu dimensiunea scaunului rulant. 22. Prinderea de blocare se poate mișca spre dreapta și spre stânga.	
23. Reglează prinderea de blocare pentru a fixa dispozitivul electric pentru urcat scări.	
Comenzi motor 24. Întoarce cheia complet în sensul acelor de ceasornic pentru a porni. O lumină roșie se va aprinde pe partea din față a bateriei.	
25. Pornește butoanele de control prin comutarea întrerupătorului roșu. a. =On b. O=Off 26. Apasă butonul galben pentru a mișca dispozitivul electric pentru urcat scări înainte. 27. Apasă butonul verde pentru a mișca dispozitivul electric pentru urcat scări înapoi. Folosirea asistenței suplimentare Se recomandă ca cel puțin doi operatori să fie prezenți atunci când dispozitivul electric pentru urcat scări este utilizat pentru evacuarea persoanelor cu greutatea de peste 100 kg.	

Curățare

Curăță dispozitivul electric pentru urcat scări și piesele sale cu o cârpă curată sau o perie moale și apă caldă cu săpun. Clătește cu apă caldă și lasă la uscat la aer. Nu curăța cu produse care conțin clor sau fenol. Poate fi utilizată o perie cu peri rigizi, dacă este necesar.

AVERTISMENT

Nu lăsa niciodată o persoană evacuată nesupravegheată în dispozitivul electric pentru urcat scări și folosește întotdeauna dispozitivele de restricție.

AVERTISMENT

Evită schimbarea rapidă a poziției, deoarece acest lucru poate duce la rănirea persoanei evacuate. Susține dispozitivul electric pentru urcat scări în timpul ajustării mânerelor.

AVERTISMENT

Mentenanța necorespunzătoare poate cauza răniri. Efectuează întreținerea dispozitivului electric pentru urcat scări doar în scopul descris în acest manual.