


Ghid rapid de utilizare

1. Despachetarea dispozitivului

1. După despachetarea sistemului, verificați aspectul dispozitivului și asigurați-vă că aveți toate articolele din lista de accesorii.
2. La prima utilizare, trebuie să slăbiți cureaua compresorului din partea inferioară a mașinii (consultați Fig. 1). Apoi fixați capătul curelei de sistemul Velcro pentru a evita sunetele anormale în timpul funcționării.

Fig. 1

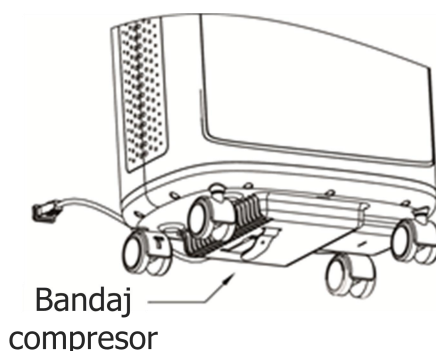

2. Funcțiile comenzilor



Buton de pornire: Utilizat pentru pornirea/oprirea dispozitivului;



Buton ON/OFF (Pornit/Oprit): Utilizat pentru pornirea/oprirea operațiunii, numai pentru SO1 5B;



Buton control debit: Folosit pentru a regla fluxul de oxigen, numai pentru SO1 5B;




Buton „Time +”: Utilizat pentru a crește timpul de funcționare, numai pentru SO1 5B;



Buton „Time –”: Utilizat pentru a reduce timpul de funcționare, numai pentru SO1 5B;

3. Configurarea inițială

Fig. 2

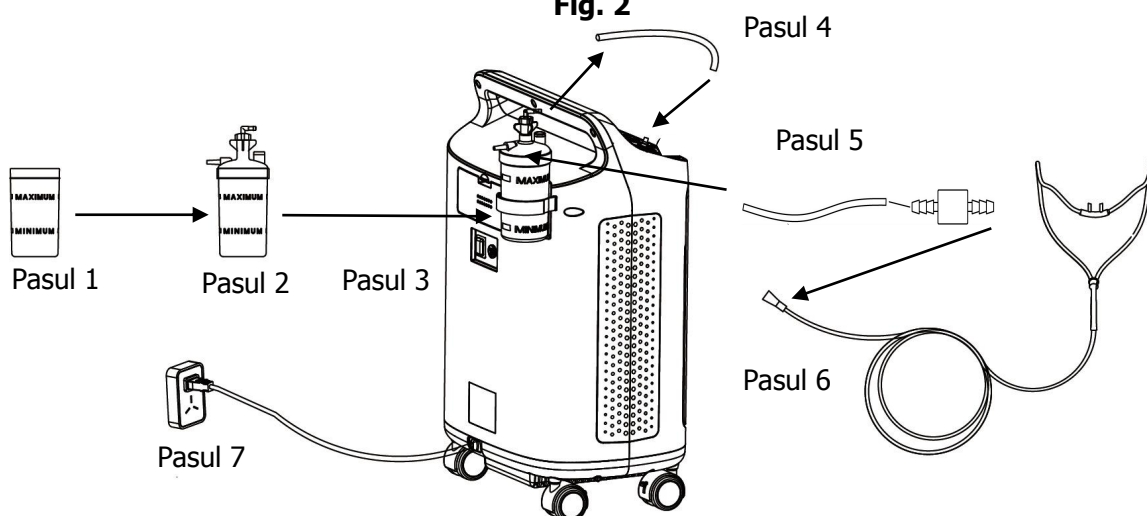

Pasul 1: Deșurubați capacul suportului umidificatorului. Turnați apă purificată (sau apă distilată) în suportul umidificatorului. Asigurați-vă că nivelul apei se află între marcajele „MAXIM” și „MINIM”.

Pasul 2: Însurubați capacul pe suportul umidificatorului și strângeți-l.

Pasul 3: Atașați suportul umidificatorului la partea din spate a dispozitivului și strângeți curea de fixare.

Pasul 4: Conectați un capăt al tubului de conectare la orificiul de admisie a aerului a suportului umidificatorului. Conectați celălalt capăt al tubului la ieșirea de oxigen a dispozitivului.

Pasul 5: Conectați un capăt al tubului de conectare la orificiul umidificatorului. Conectați celălalt capăt al tubului de conectare la supapa canulei.

Pasul 6: Conectați celălalt capăt al canulei nazale la supapa canulei.

Pasul 7: Conectați cablul de alimentare la priză.


4. Pornirea dispozitivului

1. SO1 5A

Pasul 1: Apăsăți butonul de pornire în poziția „ON” (Pornit). Apoi, lumina de fundal a afișajului LED și toate luminile indicatoare (verde, galben și roșu) se vor aprinde.

Pasul 2: Reglați fluxul de oxigen conform necesităților.

Fig. 3

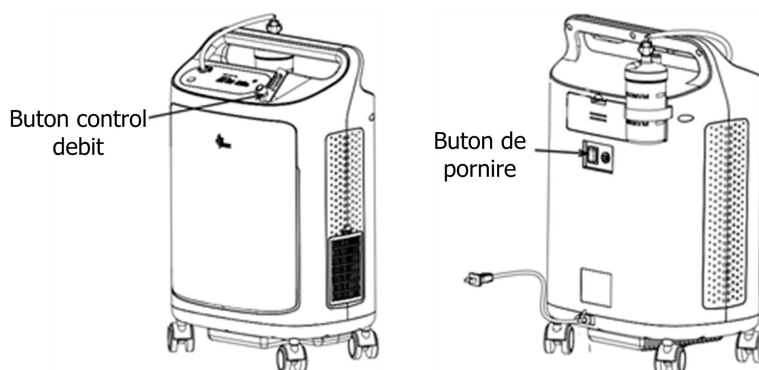

2. SO1 5B

Pasul 1: Apăsăți butonul de pornire în poziția „ON” (Pornit). Apoi, lumina de fundal a afișajului LED și toate luminile indicatoare (verde, galben și roșu) se vor aprinde.

Pasul 2: Apăsăți butonul **ON/OFF (PORNIT/OPRIT)** de pe panoul de control. Apoi concentratorul de oxigen va începe să funcționeze.

Pasul 3: Reglați fluxul de oxigen conform necesităților.

Fig. 4

