

(1) Introducerea produsului: scaunul rulant electric cu funcție de ridicare în poziție verticală utilizează principiul tijei electrice de împingere pentru a acționa șezutul, permițând utilizatorului să se ridice în picioare **fără ajutorul altor persoane**, având următoarele beneficii:

- ❖ favorizează circulația sângelui, îmbunătățește funcția cardiacă și pulmonară;
- ❖ previne infecțiile tractului urinar, reduce presiunea și evită apariția escarelor;
- ❖ utilizatorii de scaun rulant care stau așezați o perioadă lungă de timp pot dezvolta presiune abdominală, balonare frecventă, dureri abdominale, greață și vărsături. Scaunul rulant cu funcție de ridicare în poziție verticală poate reduce eficient aceste probleme fiziologice.

Pe lângă funcțiile menționate mai sus, în viața de zi cu zi, scaunul oferă un ajutor semnificativ pentru a ajunge la obiecte aflate la înălțime, pentru retrageri de numerar de la ATM, la ghișee sau la birouri. Mai important, din punct de vedere psihologic, facilitează participarea la evenimente sociale și revenirea în societatea principală.

(2) Domeniul de aplicare al funcției de ridicare în poziție verticală a scaunului rulant este destinat exclusiv persoanelor ale căror membre inferioare, genunchi și gambe, de la gambă până la picior, nu prezintă leziuni sau traumatisme. Nu este potrivit pentru următoarele situații:

- ❖ persoane cu insuficiență a membrelor inferioare în poziție ortostatică, inclusiv slăbiciune a unui membru inferior sau a ambelor membre inferioare;
- ❖ orice fragilitate osoasă a membrelor inferioare, care nu poate susține greutatea corpului uman;
- ❖ fracturi ale oricărei părți a membrelor inferioare;
- ❖ distanța de la centrul genunchiului până la călcâi mai mică de 45 cm;
- ❖ slăbiciune a membrelor superioare sau lipsa acestora, în cazurile în care membrele superioare nu pot controla operarea controllerului;
- ❖ imposibilitatea corpului de a susține poziția verticală din cauza coloanei vertebrale;
- ❖ minori;
- ❖ lipsa sensibilității la nivelul membrelor inferioare.

Timpul unei ridicări nu trebuie să depășească **30 de minute**; la fiecare 30 de minute este necesar să reveniți în poziția șezut pentru a vă odihni timp de **10 minute**, astfel încât zonele gambei să își poată restabili circulația sanguină.

Dacă aveți întrebări înainte de achiziție, vă rugăm să contactați echipa noastră de vânzări pentru consultanță pre-vânzare sau să urmați recomandările medicului dumneavoastră. În cazul în care utilizarea necorespunzătoare conduce la vătămări corporale, compania nu își asumă nicio responsabilitate.

[illegible]

- Se adoptă combinația de oțel de înaltă calitate prin sudare, cu o structură frumoasă și compactă, puternică și durabilă;
- Pedala ajustabilă este potrivită pentru ajustare individuală;

1. Deschideți perna pentru genunchi pe mâner, desprinzând-o de pe cârlig.
2. Rotiți perna pentru genunchi spre stânga și dreapta.
3. Introduceți gamba în perna pentru genunchi, ajustând-o la locația corespunzătoare.
4. Închideți mânerul și mișcați ambele părți ale suportului pentru genunchi pentru a confirma dacă mânerul este corect fixat.
5. Închideți centura de siguranță a pernei pentru genunchi.
6. Folosiți mâinile pentru a trage centura de siguranță pentru a vă asigura că este corect închisă.
7. Folosiți centura superioară de siguranță pentru a o fixa pe piept. Confirmați că ariciul și catarama centurii de siguranță sunt bine fixate.
8. Folosiți controlerul pentru a ridica scaunul.
9. Ridicați scaunul până la înălțimea maximă, apoi opriți controlerul. Nu este permis să mișcați scaunul.

- Dacă nu aveți nevoie de funcția de ridicare, puteți îndepărta perna pentru genunchi pentru a conduce scaunul cu roțile.

- Dacă înălțimea pernei pentru genunchi sau dimensiunea acesteia nu sunt adecvate, vă rugăm să contactați serviciul nostru de asistență pentru clienți sau departamentul tehnic, nu forțați utilizatorul să încerce!
- Nu deschideți centura superioară de siguranță, centura de siguranță sau butonul mânerului atunci când scaunul nu este complet coborât, deoarece acest lucru este extrem de periculos și poate cauza căderea utilizatorului și răni!
- Dacă, în timpul utilizării funcției de ridicare, apar anomalii sau zgomote neobișnuite, vă rugăm să nu continuați utilizarea. Contactați dealerul sau serviciul nostru de asistență pentru clienți.

[illegible]

Element	Data	Element	Data
Lungime totală	92cm	Tensiune de lucru	24V
Lăţime totală	59cm	Baterie	24V 28AH X 2
Înălţime totală (şezut)	96cm	Putere motor	200W X 2
Înălţime totală (ridicat)	144cm	Model controler	PG-VR2 PM60-A1
Lăţimea scaunului	46cm	Încărcător	HP8204B 24V/5A
Adâncimea scaunului	43cm	Viteză	1-8km/h
Înălţimea scaunului faţă de podea	52cm	Panta maximă	12°
Distanţa între cotiere	45cm	Capacitatea de a traversa obstacole	4cm
Înălţimea spătarului	45cm	Distanţa de frânare	<1.5m
Diametrul roţii din faţă	20cm	Autonomie (±5 km)	20km
Diametrul roţii din spate	32cm	Cerinţe de putere	11 0/230V AC
Capacitatea de încărcare	110kg	Frecvenţă de putere	50-60Hz
Greutatea netă (N.W.)	67kg	Fusibil încărcător	10A 115V/230V
Curentul de încărcare	24V DC5A	Fusibil baterie	50a 115V/230V

(1) Tensiunea încărcătorului trebuie selectată în poziția corespunzătoare tensiunii sursei de alimentare.

Metode de întreținere

- ## Reglementări privind garanția

- Pagina 6

Piesele deteriorate care sunt înlocuite gratuit în perioada de garanție devin proprietatea companiei noastre.

În cazul în care **persoane neautorizate** efectuează modificări ale structurii scaunului rulant sau dacă **reparațiile și înlocuirile nu sunt realizate folosind piese originale ale companiei noastre**, perioada de garanție va fi **anulată**. Pentru orice pierderi rezultate, compania **nu își asumă nicio responsabilitate**.

Următoarele situații nu sunt acoperite de garanție:

- A.** Lipsa manualului de garanție;
- B.** Mențiuni în manualul de garanție care indică faptul că **modelul scaunului rulant nu corespunde** sau că modelul a fost modificat;
- C.** Anvelopele interioare și exterioare, precum și anvelopele interioare și exterioare ale roții directoare frontale **nu sunt incluse în garanție**;
- D.** Pierderi și daune cauzate de **neutilizarea conform instrucțiunilor de exploatare**;
- E.** Situații de **forță majoră sau accidente**, inclusiv, dar fără a se limita la incendii, inundații, cutremure, accidente auto etc.;

F. Defecțiuni cauzate de uzura naturală, deteriorări externe sau întreținere necorespunzătoare a scaunului rulant, inclusiv:

- ❖ deformarea pernei scaunului ca urmare a utilizării;
- ❖ deteriorarea rulmenților din cauza pătrunderii apei sau a lipsei lubrifierii cu ulei, ducând la ruginire;
- ❖ fisuri și deteriorări ale materialului cotierei (această componentă beneficiază de garanție de trei luni);
- ❖ slăbirea sau ruperea roții de tracțiune;
- ❖ decolorarea pieselor metalice;
- ❖ zgârieturi de suprafață și modificări de culoare ale stratului de vopsea cauzate de frecarea pieselor mobile;
- ❖ deteriorări ale suprafeței cauzate de coliziuni;
- ❖ deformarea cadrului, deteriorări prin impact, fisuri și avarii ale altor componente cauzate de căderi;
- ❖ zgomote apărute în timpul utilizării ca urmare a pornirilor, opririlor sau virajelor bruște;
- ❖ ruperea panoului lateral ca urmare a presiunii sau comprimării.

Pentru situațiile care **depășesc perioada de garanție** sau nu sunt acoperite de aceasta, compania va oferi **servicii de reparație contra cost**.