

MANUAL DE INSTRUȚIUNI

Forest 3 SU



Cuprins

MANUAL DE INSTRUCȚIUNI.....	1
Prefață.....	5
1.1. Opțiuni	7
2. Înainte de utilizare	7
2.1. Utilizarea prevăzută.....	7
2.2. Instrucțiuni generale de siguranță	8
2.3. Simboluri pe scaunul cu roțile	9
2.4. Transport.....	10
2.4.1. Deplasare.....	10
2.4.2. Transport cu avionul.....	10
2.4.3. Transport cu vehiculul, ca bagaj.....	10
2.4.4. Transport cu vehiculul, ca scaun pentru utilizator	11
2.5. Prima utilizare și depozitare	13
3. Utilizarea scaunului cu roțile.....	13
3.1. Prima deplasare	14
3.2. Deplasare afară.....	15
3.2.1. Deplasarea pe pante, borduri, obstacole și rampe.....	15
3.3. Consolă de operare	16
3.3.1. Protecții tehnice	17
3.4. Maneta frânei și a roții libere	17
3.4.1. Funcționarea manetei de roată liberă.....	17
3.5. Transferul către/din scaunul cu roțile.....	18
3.5.1. Transfer	18
3.5.2. Așezarea în scaunul cu roțile.....	18
3.5.3. Reglarea în poziție stabilă	18
3.6. Reglaje pentru confort.....	19
3.6.1. Centura de siguranță.....	19
3.6.2. Consolă de operare.....	19
3.6.3. Cotiere	19
3.6.4. Pernuțe pentru brațe	20
3.6.5. Suport pentru picioare B06	20
3.6.6. Plăcuță de sprijin pentru picioare B06.....	21

3.6.7. Suport pentru picioare BZ7-BZ8.....	21
3.6.8. Suport pentru cap L58	21
3.6.9. Suspensia	22
3.7. Starea bateriei și alimentarea	23
4. Întreținere	24
4.1. Puncte de întreținere	24
4.1.1. Înainte de fiecare utilizare	24
4.1.2. Anual sau mai des	25
4.1.3. Dacă este depozitat.....	25
4.2. Instrucțiuni de întreținere	25
4.2.1. Roți și anvelope	25
4.2.2. Curățare	25
4.2.3. Dezinfecție	26
4.3. Depanare.....	26
4.3.1. Protecție la suprasarcină	26
4.4. Durata de viață estimată	27
4.5. Reutilizare	27
4.6. Sfârșitul utilizării	27
4.7. Garanție.....	27
5. Specificații tehnice	27
Toate drepturile rezervate, inclusiv traducerea.....	40

Prefață

Felicitări! Acum sunteți proprietarul unui scaun rulant Vermeiren!

Acest scaun rulant este realizat de personal calificat și dedicat. Este proiectat și fabricat conform standardelor înalte de calitate, garantate de Vermeiren.

Vă mulțumim pentru încrederea acordată produselor Vermeiren. Pentru a vă sprijini în utilizarea acestui scaun rulant și a funcțiilor sale de operare, vă oferim acest manual. Vă rugăm să citiți manualul cu atenție; acesta vă va ajuta să vă familiarizați cu modul de utilizare, capabilitățile și limitările scaunului rulant.

Dacă aveți întrebări după ce ați citit manualul, nu ezitați să contactați dealerul specialist. Acesta vă va ajuta cu plăcere.

Notă importantă

Pentru a vă asigura siguranța și pentru a prelungi durata de viață a produsului, vă rugăm să aveți grijă de acesta și să efectuați verificări și întreținere periodică.

Acest manual reflectă cele mai recente dezvoltări ale produsului. Vermeiren își rezervă dreptul de a implementa modificări la acest tip de produs fără nicio obligație de a adapta sau înlocui produsele similare livrate anterior.

Imaginile produsului sunt folosite pentru a clarifica instrucțiunile. Detaliile produsului prezentat pot diferi de produsul dumneavoastră.

Informații disponibile

Pe site-ul nostru <http://www.vermeiren.com/> veți găsi întotdeauna cea mai recentă versiune a următoarelor informații. Vă rugăm să consultați acest site în mod regulat pentru eventuale actualizări.

Persoanele cu deficiențe de vedere pot descărca versiunea electronică a acestui manual și o pot asculta folosind o aplicație software de tip text-to-speech.

	Manual de utilizare Pentru utilizator și dealer specialist
	Manual de utilizare pentru consolă de operare aplicată și încărcător de baterii Pentru utilizator și dealer specialist
	Instrucțiuni de instalare Pentru dealer specialist
	Manual de service pentru scaune rulante Pentru dealer specialist
	Declarație CE de conformitate

1. Produsul dvs.



1. Spătar
2. Brațe de susținere / Cotiera
3. Tampoane pentru brațe / Perne pentru brațe
4. Consolă de operare
5. Șezut / Scaun
6. Centură de siguranță
7. Suporturi pentru picioare sau tălpi
8. Plăcuțe pentru picioare / Talpi
9. Roți direcționale (roțile din față)
10. Roți de tracțiune (roțile din spate)
11. Motoare de tracțiune
12. Carcasă pentru baterie
13. Lumini frontale (opțional)
14. Lumini spate (opțional)
15. Sistem anti-răsturnare
16. Placa de identificare

1.1. Opțiuni

Contactați distribuitorul specializat pentru a afla mai multe despre opțiuni. Acesta vă va oferi cu plăcere sfaturi utile.

2. Înainte de utilizare

2.1. Utilizarea prevăzută

În acest paragraf se oferă o scurtă descriere a utilizării intenționate a produsului dumneavoastră. În plus, avertismente relevante sunt adăugate în instrucțiunile din celelalte paragrafe. În acest fel, dorim să vă facem conștient de posibilele utilizări necorespunzătoare care pot apărea.

- Acest produs este un dispozitiv medical.
- Indicații și contraindicații: Acest scaun cu roțile poate fi utilizat de către persoana care stă în scaunul cu roțile sau poate fi împins de un însoțitor. Scaunul cu roțile este proiectat și fabricat pentru a fi un ajutor de transport pentru utilizatorii care suferă de paralizie, pierderea membrelor sau deformări/defecte ale membrelor, insuficiențe cardiace etc. NU trebuie să folosiți acest scaun cu roțile fără însoțitor dacă suferiți de deficiențe fizice sau mentale care vă pot pune în pericol pe dumneavoastră sau pe alte persoane în timpul utilizării scaunului. Din acest motiv, consultați mai întâi medicul și asigurați-vă că distribuitorul dumneavoastră specializat este informat despre recomandările acestuia.
- Acest scaun cu roțile este potrivit pentru utilizare atât în interior, cât și în exterior.
- Acest scaun cu roțile este proiectat și fabricat exclusiv pentru transportul/transferul unei (1) persoane cu o greutate maximă de 130 kg. Nu este conceput pentru transportul de bunuri sau obiecte, nici pentru alte utilizări decât cele descrise anterior.
- Folosiți doar accesorii și piese de schimb aprobate de Vermeiren.
- Vă rugăm să citiți toate detaliile tehnice și limitele scaunului cu roțile în capitolul 5.
- Garanția acestui produs se bazează pe utilizarea și întreținerea normală, așa cum sunt descrise în acest manual. Deteriorarea produsului cauzată de utilizarea necorespunzătoare sau de lipsa întreținerii va duce la pierderea garanției.

2.2. Instrucțiuni generale de siguranță

PRECAUȚII

Riscul de răniri și/sau daune

- Citiți cu atenție și urmați instrucțiunile din acest manual. În caz contrar, vă puteți răni sau scaunul cu roțile se poate deteriora.

Țineți cont de următoarele avertismente generale în timpul utilizării:

- Nu utilizați scaunul cu roțile dacă sunteți sub influența alcoolului, medicamentelor sau a altor substanțe care vă pot afecta capacitatea de a conduce.
- Rețineți că unele părți ale scaunului cu roțile se pot încălzi sau răci foarte tare din cauza temperaturii ambientale, a radiației solare, a dispozitivelor de încălzire sau a motorului în timpul deplasării. Aveți grijă când le atingeți. Purtați îmbrăcăminte de protecție dacă vremea este rece. După deplasare, așteptați până când scaunul cu roțile/motorul s-a răcit.
- Înainte de a porni scaunul cu roțile, fiți conștient de mediul/situația în care vă aflați. Adaptați-vă viteza la acestea înainte de a porni. Vă recomandăm să utilizați cea mai mică viteză pentru a conduce în interior. Pentru conducerea în exterior, puteți regla viteza la o viteză adecvată, la care vă simțiți confortabil și în siguranță.
- Rețineți ÎNTOTDEAUNA că scaunul cu roțile se poate opri brusc din cauza unei baterii descărcate sau a unei protecții care împiedică deteriorarea scaunului cu roțile. Verificați, de asemenea, cauzele posibile menționate în § 4.3.. Utilizați centura de siguranță pentru a preveni rănilor.
- Scaunul dvs. cu roțile a fost testat pentru compatibilitate electromagnetică și este conform cu standardul, a se vedea capitolul 5.. Cu toate acestea, sursele de câmpuri electromagnetice pot influența performanța de conducere a scaunului dvs. cu roțile, cum ar fi câmpurile telefoanelor mobile, generatoarelor de energie electrică sau surselor de energie de mare putere. Pe de altă parte, componentele electronice ale scaunului cu roțile pot afecta și alte aparate electronice, cum ar fi sistemele de alarmă ale magazinelor și ușile automate. Prin urmare, vă recomandăm să verificați periodic scaunul cu roțile pentru a depista eventualele deteriorări și uzuri, deoarece acestea pot amplifica interferențele (a se vedea și capitolul 4.).
- Conduceți numai pe suprafețe plane, unde ambele roți motrice ating solul și unde există un contact suficient pentru a opera scaunul cu roțile în siguranță.
- Nu se vor efectua modificări sau înlocuiri ale punctelor de fixare ale scaunului cu roțile sau ale părților sau componentelor structurale și ale cadrului fără a consulta producătorul scaunului cu roțile.
- Asigurați-vă că mâinile, hainele, centurile, cataramele sau bijuteriile nu se prind în roți sau în alte părți mobile în timpul utilizării.

Rețineți că scaunul dvs. cu roțile poate interfera cu anumite tipuri de sisteme antifurt, în funcție de setările utilizate. Acest lucru poate declanșa alarma magazinului.

Orice incident grav [MDR (UE) 2017/745 §2 (65)] care a avut loc în legătură cu dispozitivul trebuie raportat producătorului și autorității competente din statul membru

în care este stabilit utilizatorul și/sau pacientul.

2.3. Simboluri pe scaunul cu roțile

	Greutatea maximă a utilizatorului în kg
	Înclinație maximă sigură în ° (grade).
	Numai pentru utilizare în interior (încărcător de baterie)
	Viteza maximă
	Denumirea tipului
	Număr de catalog
	Număr de serie
	Dispozitiv medical
	Producător
	Data fabricației
	Declarație de conformitate
	Atenție: informații importante
	Se recomandă citirea manualului
	Risc de prindere
	Poate fi utilizat ca scaun într-un vehicul motorizat; indică punctele de fixare
	Numai pentru dispozitive electrice: Clasa de protecție II
	Numai pentru dispozitive electrice: Nu aruncați piesele la gunoiul menajer! Trimiteți-le pentru reciclare corespunzătoare.

2.4. Transport

PRECAUȚII

Riscul de deteriorare

Luați măsuri pentru a proteja scaunul cu roțile împotriva deteriorării în timpul transportului.

2.4.1. Deplasare

Utilizați consola de comandă pentru a conduce scaunul cu roțile la destinație.

În caz contrar, puneți scaunul cu roțile în modul de rulare liberă (vezi §3.4.) și utilizați bara de împingere pentru a-l deplasa.

2.4.2. Transport cu avionul

Deoarece scaunul cu roțile este echipat cu baterii AGM care nu se pot vărsa, este posibil să transportați scaunul cu roțile (în întregime) cu avionul. Consultați compania aeriană pentru procedurile corecte de manipulare înainte de a rezerva biletul de avion. Înainte de a preda scaunul cu roțile personalului aeroportului, deconectați bateria de la scaunul cu roțile, consultați manualul de instalare.

2.4.3. Transport cu vehiculul, ca bagaj

AVERTISMENT

Riscul de răniri și/sau daune

- Asigurați-vă că levierul de rulare liberă este în poziția de frânare în timpul transportului, vezi § 3.4.
 1. Folosiți consola de operare pentru a readuce scaunul cu roțile în poziție stabilă, vezi § 3.5.3.
 2. Îndepărtați toate accesoriile montate, cum ar fi tăvile și echipamentele respiratorii, și depozitați-le într-un loc sigur.
 3. Folosiți o rampă pentru a introduce scaunul cu roțile în compartimentul pentru bagaje al vehiculului:
 - Setăți scaunul cu roțile la cea mai mică viteză.
 - Acționați joystick-ul pentru a conduce scaunul cu roțile înainte pe rampă și în interiorul vehiculului. Mergeți lângă scaunul cu roțile și urmați-l în timp ce se deplasează, dar NU mergeți cu el pe rampe.
 - Opriți consola de comandă.
 4. Fixați bine cadrul scaunului cu roțile la vehicul folosind sistemul de fixare cu curele (vezi Figura 1).
 5. Puneți scaunul cu roțile în modul de deplasare (acționând frânele de parcare) și verificați dacă consola de comandă este oprită.

2.4.4. Transport cu vehiculul, ca scaun pentru utilizator

Scaunul cu rotile a trecut testul de coliziune ISO 7176-19: 2022 și, ca atare, a fost proiectat și testat pentru a fi utilizat numai ca scaun orientat cu fața spre înainte într-un autovehicul.

Scaunul cu rotile este testat dinamic cu ATD (dispozitiv de testare antropomorf) utilizând un sistem de fixare cu curele în 6 puncte și un sistem de reținere a ocupantului în 3 puncte. Cu toate acestea, utilizatorul ar trebui să fie transferat, de preferință, pe unul dintre scaunele din interiorul vehiculului și să utilizeze sistemul de reținere al vehiculului. Scaunul cu rotile trebuie depozitat ca bagaj într-un compartiment separat (de marfă), a se vedea §2.4.3.

AVERTISMENT

Riscul de răniri și/sau daune

- Utilizați centura pelviană a scaunului cu rotile și centura cu trei puncte din vehicul pentru a preveni lovirea capului și a pieptului de vehicul.
- Nu utilizați suporturi posturale pentru a imobiliza utilizatorul în vehicul, cu excepția cazului în care acestea sunt etichetate ca fiind conforme cu cerințele specificate în ISO 7176-19:2022.
- După implicarea într-un accident rutier de orice tip, solicitați inspectarea scaunului cu rotile de către un distribuitor specializat sau un reprezentant al producătorului înainte de a-l reutiliza.

2.4.4.1. Asigurarea scaunului cu rotile

1. Asigurați-vă că vehiculul dispune de un sistem adecvat de fixare a scaunului cu rotile cu șase puncte de prindere și de reținere a ocupantului, conform ISO 10542, și că ambele sisteme nu sunt uzate, contaminate, deteriorate sau rupte.
2. Utilizați consola de comandă pentru a readuce scaunul cu rotile în poziție stabilă, a se vedea §3.5.3..
3. Îndepărtați toate accesoriile montate, cum ar fi tăvile și echipamentul respirator, și fixați-le într-un loc sigur. Dacă acest lucru nu este posibil, fixați-le pe scaunul cu rotile, dar poziționate la distanță de ocupant, cu o căptușeală care absoarbe energia plasată între tavă și utilizator.
4. Utilizați o rampă pentru a conduce scaunul cu rotile (cu utilizatorul) în vehicul, conform instrucțiunilor din §3.2.1..
5. Poziționați scaunul cu rotile cu fața în direcția de deplasare, central între șinele de fixare montate pe podeaua vehiculului.
6. Asigurați-vă că utilizatorul stă cât mai drept posibil. Dacă starea utilizatorului împiedică acest lucru, efectuați o evaluare a riscurilor pentru a evalua siguranța utilizatorului în timpul transportului.
7. Opriți consola de comandă și asigurați-vă că maneta de roată liberă este în modul de frânare, a se vedea §3.4.
8. Poziția fiecărui punct de fixare de pe scaunul cu rotile este marcată cu următorul

simbol:



9. Verificați dacă capătul de fixare este compatibil cu punctele de fixare ale scaunului cu roțile.
10. Atașați cârligele curelei de fixare frontale la punctele de fixare (A) de pe scaunul cu roțile, urmând instrucțiunile furnizorului sistemului de curele.
11. Rotiți maneta roții libere în poziția roată liberă și rotiți scaunul cu roțile înapoi pentru a strânge curelele frontale, vezi §3.4..
12. Atașați cârligele curelelor de fixare din spate la punctele de fixare (B+C) din spate, în același mod.
13. Rotiți maneta de roată liberă înapoi în poziția de frânare, vezi §3.4..



Fig. 1

2.4.4.2. Siguranța utilizatorului

1. Atașați centura pelviană a scaunului cu roțile.
2. Atașați centurile de siguranță ale ocupanților conform instrucțiunilor producătorului sistemului de centuri.

Purtați centura pelviană jos, în partea din față a pelvisului, astfel încât unghiul centurii pelviene să se încadreze în zona preferată de 30° până la 75° față de orizontală, similar cu cel prezentat mai jos. Este de preferat un unghi mai pronunțat (mai mare) în zona preferată.

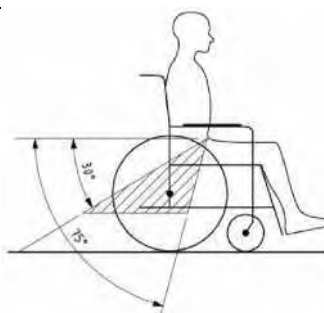


Fig. 2

3. Reglați centura strâns, conform instrucțiunilor producătorului sistemului de curele, în funcție de confortul utilizatorului.
4. Asigurați-vă că centura de siguranță se conectează în linie dreaptă la punctul de ancorare din vehicul și că nu sunt vizibile îndoituri ale centurii, de exemplu la axul roții din spate.
5. Poziționați catarama centurii de siguranță astfel încât butonul de eliberare să nu intre în contact cu componentele scaunului cu roțile în cazul unui accident.
6. Asigurați-vă că centurile nu sunt răsucite sau ținute la distanță de corp, așa cum se arată în figura 3.
7. Asigurați-vă că centurile de siguranță pentru umeri se potrivesc peste umeri, a se vedea figura 4.

Centurile de siguranță nu trebuie să fie ținute la distanță de corp de componentele scaunului cu roțile, cum ar fi cotiere sau roți.  Fig. 3	Centurile de siguranță sunt în contact complet cu umerii, pieptul și pelvisul. Centura pelviană este poziționată jos pe pelvis, lângă joncțiunea dintre coapsă și abdomen.  Fig. 4
---	--

2.5. Prima utilizare și depozitare

PRECAUȚII

Riscul de deteriorare a bateriei

- Nu descărcați niciodată complet bateria.
- Nu întrerupeți ciclul de încărcare; deconectați încărcătorul de baterii numai când bateria este complet încărcată.
- Asigurați-vă că scaunul cu roțile este depozitat într-un mediu uscat pentru a preveni apariția mușgaiului și deteriorarea tapițeriei, a se vedea și capitolul 5.

Asigurați-vă că bateria a fost încărcată complet înainte de a utiliza scaunul cu roțile, întrebați distribuitorul dacă acest lucru a fost deja făcut sau nu. Pentru încărcare, urmați instrucțiunile de încărcare din §3.7.

3. Utilizarea scaunului cu roțile

AVERTISMENT

Risc de rănire

- Citiți mai întâi capitolele anterioare și informați-vă cu privire la utilizarea

prevăzută. NU utilizați scaunul cu roțile decât după ce ați citit și înțeles pe deplin toate instrucțiunile.

- Citiți, de asemenea, instrucțiunile din manualul consolei operatorului și din manualul încărcătorului de baterii!
- În caz de îndoieli sau întrebări, nu ezitați să contactați distribuitorul specializat local, furnizorul de servicii medicale sau consilierul tehnic pentru a vă ajuta în acest sens.

3.1. Prima deplasare

PRECAUȚII

Riscul de răniri și/sau daune

- Țineți întotdeauna cont de raza de mișcare a suportului pentru picioare și a consolei de comandă pentru a preveni rănirea persoanelor din jur sau deteriorarea obiectelor.
- Deconectați întotdeauna încărcătorul de baterie de la scaunul cu roțile înainte de a începe să conduceți.
- Asigurați-vă că sunteți familiarizat cu funcționarea scaunului cu roțile înainte de a-l utiliza în locuri aglomerate și potențial periculoase. Exersați mai întâi într-o zonă spațioasă și deschisă, cu puține persoane în jur.
- Studiați efectele deplasării centrului de greutate asupra comportamentului scaunului cu roțile, de exemplu pe pante ascendente sau descendente, pe teren înclinat lateral sau la depășirea obstacolelor. Solicitați ajutorul unui însoțitor.
- Suprafața controlerului se încălzește ușor în timpul utilizării.
- În timpul deplasării înapoi, viteza este redusă.

1. Asigurați-vă că

- scaunul cu roțile se află pe o suprafață plană;
- bateria este complet încărcată, consultați § 3.7.;
- motorul este cuplat, consultați § 3.4.;
- anvelopele au presiunea corectă (dacă este cazul), consultați § 4.2.1.;
- scaunul cu roțile este adaptat nevoilor și confortului dvs., a se vedea §3.6.;
- aveți o poziție corectă de ședere, a se vedea § 3.5.2..

2. Urmăriți instrucțiunile din manualul consolei de comandă.

- Porniți scaunul cu roțile.
- Rotiți comanda de viteză la cea mai mică setare de viteză.
- Exersați modul de conducere și reglarea scaunului cu roțile.
- Dacă vă simțiți suficient de încrezător, puteți încerca să conduceți la o viteză mai mare.
- Acum încercați să virajați, în direcția înainte și înapoi. Repetați acest lucru de câteva ori. Asigurați-vă că scaunul cu roțile este stabil la sfârșitul deplasării.
- Opriți scaunul cu roțile.

3.2. Deplasare afară

AVERTISMENT

Risc de accident - Adaptați-vă comportamentul când vă deplasați și viteza.

- Țineți cont de legislația locală privind traficul rutier; aceasta poate diferi de la o țară la alta. Acest lucru este valabil pentru conducerea pe trotuare, drumuri neasfaltate sau drumuri asfaltate.
- Nu conduceți pe drumuri cu trafic intens.
- Țineți cont de condițiile meteorologice. Evitați să conduceți pe vreme umedă, căldură extremă, zăpadă, gheață neagră, temperaturi sub zero; consultați specificațiile tehnice din capitolul 5.
- Chiar și cu luminile scaunului cu roțile aprinse, nu este recomandat să conduceți pe drumurile publice în condiții de vizibilitate redusă
- (întuneric, ceață, amurg). Asigurați-vă că sunteți bine vizibil, inclusiv în timpul zilei, folosind îmbrăcăminte fluorescentă și/sau iluminare proprie în partea din față și din spate a scaunului cu roțile.
- Fiți atent la ceilalți participanți la trafic pentru care scaunul dvs. cu roțile poate constitui un obstacol. Acordați o atenție specială în timpul virajelor și mersului înapoi. Dacă nu sunteți familiarizat cu modul de conducere înapoi, exersați mai întâi într-o zonă deschisă. Indicați direcția în care intenționați să mergeți înainte de a vira.
- Încercați să conduceți în linie dreaptă pe pasaje înguste pentru a evita blocarea.
- Țineți cont de distanța de frânare. Rețineți că distanța de frânare depinde de viteză, suprafață, condiții meteorologice, pantă și greutatea utilizatorului.

3.2.1. Deplasarea pe pante, borduri, obstacole și rampe

PRECAUȚII

Risc de rănire

- Folosiți o centură de siguranță pentru a vă asigura că stați bine în scaunul cu roțile.
- Fiți atenți dacă drumul este nisipos, are sol moale, gropi sau goluri care pot provoca blocarea roților și/sau scăderea tracțiunii roților motrice.
- NU conduceți pe pante, obstacole, trepte sau borduri mai mari decât cele specificate în § 5.
- Abordați întotdeauna bordura din față.
- Nu puneți scaunul cu roțile în modul de rulare liberă pe o pantă. Scaunul cu roțile se poate pune în mișcare, provocând leziuni dumneavoastră sau persoanelor din jur.
- Nu utilizați scaunul cu roțile pe scări rulante sau scări.
- Utilizați numai rampele aprobate de Vermeiren și nu depășiți sarcina maximă admisă.
- Pentru a depăși în siguranță obstacolele sau pantele, puneți scaunul cu roțile în poziția cea mai verticală.

Când vă opriți pe o pantă, frâna va funcționa automat pentru a împiedica scaunul cu roțile să se deplaseze înainte sau înapoi.

PRECAUȚII

Risc de daună

- Parcați întotdeauna scaunul cu roțile electric pe suprafețe plane orizontale și în locuri ușor accesibile.
- Dacă este necesar, luați puțină viteză pentru a accelera scaunul cu roțile și a urca o pantă, un obstacol, un bord sau o rampă. Evitați ca dvs. sau scaunul cu roțile să fiți supuși unui recul puternic.
- Asigurați-vă că scaunul cu roțile nu atinge solul sau rampa din cauza înclinării scaunului cu roțile.
- Rețineți că distanța de frânare pe pantele în jos poate fi semnificativ mai mare decât pe teren plat.
- 1. Porniți în conformitate cu instrucțiunile din § 3.1., pasul 1.
- 2. Pentru a deplasa scaunul cu roțile în sus sau în jos pe scări/trepte, utilizați echipamente de ridicare sau o rampă. Dacă acestea nu sunt disponibile, scaunul poate fi ridicat manual de cel puțin două persoane, apucând ferm cadrul cu ambele mâini. Nu utilizați spătarul, suportul (suporturile) pentru picioare, cotiere sau roți pentru a apuca scaunul cu roțile.
- 3. Pentru a face față obstacolelor sau înclinațiilor:
 - Reglați scaunul cu roțile în poziția cea mai stabilă, consultați § 3.5.3..
 - Conduceți cât mai încet posibil pentru a face față obstacolului sau înclinației.

3.3. Consolă de operare

PRECAUȚII

Risc de rănire și / sau daună

- Rețineți că stabilitatea scade atunci când scaunul cu roțile este reglat din poziția dreaptă în poziție înclinată.
- Asigurați-vă că există suficient spațiu în jurul scaunului cu roțile pentru a acționa spătarul și scaunul.
- Când scaunul este înclinat în poziția cea mai avansată, este posibil ca suporturile pentru picioare să atingă roțile din față. Această poziție este destinată în principal pentru transferul în/din scaunul cu roțile.
- Cu masa opțională B15A: Asigurați-vă că consola de comandă este rotită spre exterior și oprită înainte de a utiliza masa.

Modul de utilizare a consolei de comandă este descris într-un manual de utilizare specific, inclus în livrarea scaunului cu roțile. Dacă acest manual lipsește, contactați imediat distribuitorul specializat.

Puneți joystick-ul în poziția neutră (centrală) înainte de a apăsa butonul de pornire/oprire, altfel sistemul electronic va fi blocat. Pentru a debloca acest sistem, opriți și porniți din nou consola de comandă.

3.3.1. Protecții tehnice

Consola de comandă vă permite să controlați toate componentele de conducere și motoarele pentru a regla poziția corpului. Pentru siguranța dumneavoastră și pentru a preveni deteriorarea scaunului cu roțile, mișcările sunt monitorizate de sistemul electronic. Acest lucru poate duce la blocarea mișcării, reducerea vitezei sau oprirea completă. Consultați manualul de utilizare al consolei de comandă pentru mai multe informații.

Pentru a evita descărcarea accidentală a bateriei, scaunul dvs. cu roțile este echipat cu un sistem automat de oprire a alimentării. Acest sistem oprește automat consola de comandă atunci când nu este utilizată o perioadă de timp. Dacă se întâmplă acest lucru, pur și simplu reporniți consola.

3.4. Maneta frânei și a roții libere

AVERTISMENT

Risc de rănire și / sau daună

- Acționați maneta de roată liberă numai când scaunul cu roțile este OPRIT. Maneta de roată liberă trebuie acționată de un însoțitor. NU o acționați NICIODATĂ din poziția șezând.
- Nu utilizați modul roată liberă pe pante și înclinații, a se vedea simbolul de pe motor:



Asigurați-vă că maneta de roată liberă se află în poziția de frânare ÎNAINTE de a porni scaunul cu roțile. Frânele electromagnetice NU funcționează dacă scaunul cu roțile se află în modul de roată liberă. Acest lucru este indicat pe consola de comandă. Conducerea nu este posibilă.

Scaunul dvs. cu roțile este echipat cu frâne electromagnetice. Funcționarea frânelor depinde de poziția manetei de roată liberă (1).

Frânele EM funcționează automat, numai dacă maneta de roată liberă (1) este în poziția de frânare. În această situație, frânele încep să frâneze dacă:

- scaunul cu roțile este OPRIT;
- scaunul cu roțile este PORNIT și joystick-ul este eliberat.

Eliberarea joystick-ului face ca scaunul cu roțile să se oprească ușor și activează frânele.

3.4.1. Funcționarea manetei de roată liberă

	Rotiți manetele către simbolul „Neutru” pentru a pune scaunul cu roțile în modul de rulare liberă. Motorul este acum deconectat. Scaunul cu roțile poate fi deplasat manual.
	Rotiți manetele către simbolul „Conducere” pentru a conecta motorul la transmisie. Acest lucru trebuie făcut înainte de a porni scaunul cu roțile.



3.5. Transferul către/din scaunul cu rotile.

PRECAUȚII

Risc de rănire și/ sau daună

- În cazul în care nu puteți efectua transferul în condiții de siguranță, cereți ajutorul unei alte persoane.
- Nu stați în picioare pe suporturile pentru picioare.

3.5.1. Transfer

1. Poziționați scaunul cu roțile cât mai aproape posibil de scaunul, canapeaua sau patul pe care doriți să vă transferați.
2. Aplicați frânele rotind maneta de roată liberă în poziția de frânare, vezi § 3.4..
3. Utilizați consola de comandă pentru a muta spătarul și scaunul în poziția de șezut, vezi manualul de utilizare al consolei.
4. Răsuciți suporturile pentru picioare în sus pentru a preveni călcarea pe ele.
5. Dacă este necesar, răsuciți o cotieră înapoi/în sus pentru a face loc, vezi § 3.6.3..
6. Transferați-vă pe/de pe scaunul cu roțile folosind forța brațelor sau cu ajutorul unui însoțitor (însoțitorilor) sau al unui echipament de ridicare.

3.5.2. Așezarea în scaunul cu roțile

1. Așezați-vă pe scaun cu partea inferioară a spatelui lipită de spătar.
2. Rotiți suportul (suporturile) pentru picioare în jos și așezați picioarele pe suporturi.
3. Rotiți cotierele în jos, dacă este cazul.
4. Asigurați-vă că partea superioară a picioarelor este în poziție orizontală și că picioarele sunt într-o poziție confortabilă. Reglați dacă este necesar, consultați §3.6.7..
5. Asigurați-vă că brațele sunt îndoite și se sprijină confortabil pe cotierele scaunului. Reglați dacă este necesar, consultați §3.6.3..

3.5.3. Reglarea în poziție stabilă

Pentru transport și atunci când trebuie să depășiți obstacole, scaunul cu roțile trebuie reglat pentru a maximiza stabilitatea:

- Scaunul în poziție orizontală
- Spătarul în poziție verticală
- Cotierele în poziție inferioară
- Suportul pentru picioare pliat sau reglat într-o poziție mai înaltă pentru a

- preveni atingerea obstacolului
- Consola de comandă rotită spre interior

3.6. Reglaje pentru confort

PRECAUȚII

Risc de rănire și/ sau daună

- Următoarele reglaje de confort pot fi efectuate de însoțitor sau îngrijitor. Toate celelalte reglaje sunt efectuate de distribuitorul specializat, conform instrucțiunilor de instalare, a se vedea prefața.
- Asigurați-vă că degetele, hainele și cataramele nu rămân prinse în timpul reglajului.

3.6.1. Centura de siguranță

Fixați centura de siguranță prin fixarea cataramei în dispozitivul de prindere. Dacă este necesar, reglați lungimea curelelor.

Pentru a deschide centura de siguranță, apăsați butonul roșu.

3.6.2. Consolă de operare

Consola de comandă are un sistem pivotant și poate fi rotită orizontal spre stânga/dreapta.

Apucați suportul de comandă (2) de sub consola de comandă și mișcați-l spre stânga/dreapta în poziția dorită.




3.6.3. Cotiere

3.6.3.1. Poziții:

Cotierele pot fi rotite înapoi (în sus) pentru a facilita transferul către/din scaun.

1. Apăsați încet în jos maneta (3) a clemei dințate (4). Cotiera este deblocată (în poziția inferioară).
2. Rotiți cotiera în sus/înapoi până în poziția finală.
3. Trageți maneta (3) în sus pentru a închide clema dințată. Cotiera este blocată în poziția finală.

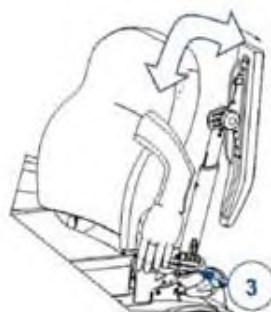

3.6.3.2. Unghiuri

Aceeași procedură se utilizează pentru a modifica unghiul cotierelor:

1. Repetați pasul 1 anterior.
2. Apoi, mențineți cotiera în poziția dorită, blocând-o cu ajutorul manetei (3).
3. Repetați această operațiune pentru a doua cotieră.
4. Asigurați-vă că ambele cotiere au același unghi.
5. Asigurați-vă că ambele cotiere sunt fixate ferm.



3.6.4. Pernuțe pentru brațe

Pernuțele (5) pot fi reglate pe înălțime (continuu) și unghi (pas de 7,5°):

1. Rotiți butonul în formă de stea (6) de câteva ori în sens antiorar. Pentru a regla unghiul, rotiți-l de cel puțin patru ori.
2. Trageți/împingeți ușor cotiera pentru a regla înălțimea.
3. Țineți pernuța la unghiul dorit.
4. Rotiți butonul în formă de stea în sensul acelor de ceasornic până când este strâns cu degetul.
5. Repetați această operațiune pentru a doua pernuță.
6. Asigurați-vă că ambele pernuțe sunt fixate ferm.



3.6.5. Suport pentru picioare B06

Pentru a scoate:

1. Trageți maneta suportului pentru picioare (7) și rotiți suportul pentru picioare (8) spre exterior.
2. Ridicați suportul pentru picioare pentru a-l scoate.

Pentru a instala:

1. Țineți suportul pentru picioare (8) în lateral și agățați-l în suportul pentru picioare (9).
2. Rotiți suportul pentru picioare spre interior până când se fixează în poziție.



3.6.6. Plăcuță de sprijin pentru picioare B06

Pentru a modifica unghiul plăcii de sprijin pentru picioare (10):

1. Slăbiți butonul în formă de stea (11) al clemei dințate (12) cu câteva rotații.
2. Rotiți placa de sprijin în sus/jos și mențineți-o în poziția dorită.
3. Strângeți butonul în formă de stea (11).
4. Repetați această operațiune pentru a doua placă de sprijin.
5. Asigurați-vă că ambele plăci de sprijin sunt fixate ferm.



3.6.7. Suport pentru picioare BZ7-BZ8

1. Slăbiți maneta (13) la punctul de rotație.
2. Reglați unghiul suportului pentru picioare ridicând/coborând plăcile pentru picioare (între 100° și 190°).
3. Strângeți din nou maneta (13) cu mâna.
4. Repetați această operațiune pentru al doilea suport pentru picioare. Asigurați-vă că ambele suporturi pentru picioare sunt bine fixate.



3.6.8. Suport pentru cap L58

Pentru a monta:

1. Slăbiți butonul în formă de stea (14).
2. Montați tubul pătrat al tetierii (15) în suportul prevăzut (16).
3. Strângeți din nou butonul în formă de stea (14) cu mâna.

Pentru a îndepărta, repetați pașii de mai sus în ordine inversă.

Pentru a regla înălțimea/adâncimea:


1. Slăbiți manetele (17).
2. Așezați tetiera în poziția dorită.
3. Strângeți din nou manetele (17) cu mâna.



3.6.9. Suspensia

Puterea arcurilor poate fi reglată pentru a vă spori confortul. Aceste arcuri sunt amplasate în partea din spate a scaunului cu roțile electric, în spatele capacului bateriei.

- Dacă rotiți dispozitivul de reglare (18) spre stânga, cursa arcurilor se lungește și suspensia devine mai moale.
- Dacă rotiți dispozitivul de reglare (18) spre dreapta, cursa arcurilor se scurtează și suspensia devine mai fermă.

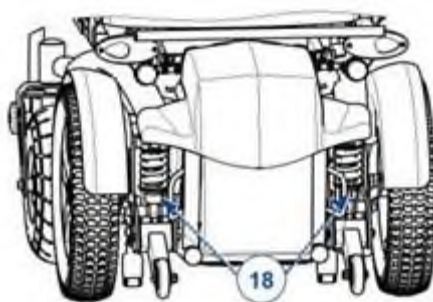

3.7. Starea bateriei și alimentarea

AVERTISMENT

Riscul de răniri și/sau daune datorită supraîncălzirii / incendiu

- Utilizați numai încărcătorul de baterii livrat împreună cu scaunul cu roțile. Utilizarea oricărui alt încărcător poate fi periculoasă (risc de incendiu).
- Încărcătorul de baterii este destinat numai încărcării bateriilor livrate împreună cu scaunul cu roțile, nu și încărcării altor baterii.
- Nu modificați niciuna dintre piesele livrate, cum ar fi cablurile, mufele sau încărcătorul de baterii. Nu deschideți și nu modificați niciodată bateria sau punctele de conectare.
- Protejați bateria și încărcătorul de baterii împotriva flăcărilor, temperaturilor ridicate și scăzute (a se vedea capitolul 5), umezelii, razelor solare, șocurilor puternice (de exemplu, căderea). NU utilizați bateria dacă s-a întâmplat acest lucru.
- Încărcați bateria cu încărcătorul de baterii, în interior, într-o zonă bine ventilată, la îndemâna copiilor.
- Citiți mai întâi instrucțiunile încărcătorului de baterii utilizat înainte de a încărca bateria scaunului cu roțile. Pentru mai multe informații, contactați distribuitorul specializat sau consultați site-ul nostru web. <http://www.vermeiren.com/>

PRECAUȚII


Risc de daună

• Autodescărcarea bateriei și curentul de repaus al utilizatorilor conectați vor consuma încărcarea bateriei încet. Bateria poate fi deteriorată ireversibil dacă este descărcată complet. Prin urmare, asigurați-vă că bateria este încărcată la timp (consultați manualul consolei de operare):

- În cazul utilizării intensive (distanțe lungi, utilizare zilnică): reîncărcați imediat după utilizare.
- În cazul utilizării medii (distanțe scurte, zilnic sau de câteva ori pe săptămână): Încărcați când indicatorul bateriei arată o descărcare de 50%.
- În cazul utilizării reduse sau depozitării: Încărcați o dată pe lună.

Citiți instrucțiunile de depozitare și întreținere din §4. și detaliile tehnice din §5..

Deconectați încărcătorul bateriei numai când bateria este complet încărcată, consultați următoarele simboluri de pe încărcător.

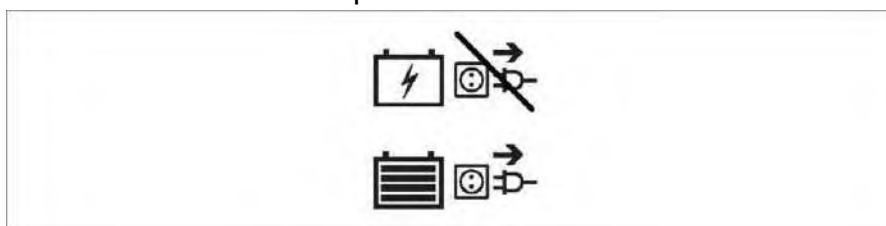

- Nu încărcați bateriile la temperaturi sub 0 °C. Mutați bateria într-un loc mai cald și începeți încărcarea.
- Păstrați punctul de conectare al încărcătorului de baterii curat, fără praf și alte impurități.

- În cazul în care apar probleme din cauza cărora bateria nu poate fi încărcată conform instrucțiunilor de mai jos, vă rugăm să contactați distribuitorul specializat.
- Pentru instrucțiuni privind schimbarea bateriilor, consultați manualul de instalare.
- Pentru toate informațiile privind indicarea stării bateriei, vă rugăm să citiți manualul consolei de operare.
- Se recomandă deconectarea încărcătorului de baterii de la rețeaua electrică atunci când nu este utilizat. Acest lucru are scopul de a preveni consumul inutil de energie.

Pentru a încărca bateria:

1. Mai întâi conectați încărcătorul de baterii la o priză de curent alternativ de 230 V. Utilizați încărcătorul de baterii direct, fără prelungitor, la sursa de alimentare (fără comutator temporizat).
2. Conectați adaptorul la punctul de încărcare al consolei de comandă.
3. Așteptați până când bateria este complet încărcată. Consultați manualul încărcătorului de baterii pentru mai multe informații.
4. Deconectați încărcătorul de baterii.
5. Scoateți încărcătorul de baterii din priză, lăsați-l să se răcească și depozitați-l în buzunarul încărcătorului.

4. Întreținere

Îngrijirea regulată asigură menținerea scaunului cu roțile într-o stare perfect funcțională. Pentru manualul de întreținere, consultați site-ul web Vermeiren: www.vermeiren.com.

4.1. Puncte de întreținere

PRECAUȚII

Riscul de răniri și/sau daune

- Reparațiile și înlocuirile pot fi efectuate numai de persoane instruite și trebuie utilizate numai piese de schimb originale Vermeiren.
- Ultima pagină a acestui manual conține un formular de înregistrare pe care distribuitorul specializat îl poate completa pentru fiecare service efectuat.
- Frecvența service-ului depinde de frecvența și intensitatea utilizării. Contactați distribuitorul pentru a stabili un program comun de inspecție/întreținere/reparații.
- Citiți instrucțiunile de utilizare ale încărcătorului de baterii utilizat în ceea ce privește întreținerea.

4.1.1. Înainte de fiecare utilizare

Verificați următoarele puncte:

- Toate piesele: prezente și neavariate sau neuzate.
- Toate piesele: curate, a se vedea § 4.2.2..

- Roți, scaun, suporturi pentru gambe, cotiere, suport pentru picioare și tetieră (dacă este cazul): bine fixate.
- Starea bateriei: încărcați bateria când este necesar, a se vedea §3.7..
- Consola de comandă, bateria, modulul de alimentare, motoarele, încărcătorul de baterie, luminile și cablurile relevante: fără deteriorări, cum ar fi fire uzate, rupte sau expuse.
- Starea roților/anvelopelor, a se vedea § 4.2.1.;
- Starea pieselor cadrului: fără deformări, instabilitate, slăbiciune sau conexiuni slăbite.
- Scaun, spătar, cotiere, tălpi pentru gambe și tetieră (dacă este cazul): fără uzură excesivă (cum ar fi urme de lovituri, deteriorări sau rupturi).

Contactați distribuitorul specializat pentru eventuale reparații sau înlocuiri de piese.

4.1.2. Anual sau mai des

Solicitați inspectarea și întreținerea scaunului cu roțile de către distribuitorul specializat, cel puțin o dată pe an sau mai des. Frecvența minimă de întreținere depinde de utilizare și, prin urmare, trebuie stabilită de comun acord cu distribuitorul specializat.

4.1.3. Dacă este depozitat

Asigurați-vă că scaunul cu roțile este depozitat într-un mediu uscat pentru a preveni apariția mușgaiului și deteriorarea tapițeriei, a se vedea și capitolul 5.

Dacă scaunul cu roțile este depozitat pentru o perioadă mai lungă, trebuie să încărcați bateriile în fiecare lună. De asemenea, este posibil să mențineți încărcătorul conectat la baterie și la rețeaua electrică în această perioadă. Pentru mai multe informații, consultați § 3.7.

4.2. Instrucțiuni de întreținere

4.2.1. Roți și anvelope

Funcționarea corectă a frânelor depinde de starea anvelopelor și poate varia în funcție de uzură și contaminare (apă, ulei, noroi etc.).

Asigurați-vă că roțile nu conțin fire, păr, nisip și fibre.

Verificați profilul anvelopelor. Dacă adâncimea benzii de rulare este mai mică de 1 mm, anvelopele trebuie înlocuite. Contactați distribuitorul specializat în acest sens.

Umflați fiecare anvelopă pneumatică la presiunea corectă (consultați indicația de presiune de pe anvelope).

Pentru instrucțiuni privind schimbarea anvelopelor, consultați manualul de instalare.

4.2.2. Curățare

PRECAUȚII

Risc de daună datorită umezelii

- Nu folosiți niciodată un furtun sau un aparat de curățat cu presiune înaltă pentru a curăța scaunul cu roțile.
- Păstrați consola de comandă curată și protejați-o de apă și ploaie.

Ștergeți toate părțile rigide ale scaunului cu roțile cu o cârpă umedă (nu udă). Dacă este necesar, utilizați un săpun delicat, potrivit pentru lacuri și materiale sintetice.

Tapițeria poate fi curățată cu apă caldă și săpun delicat. Nu utilizați agenți de curățare abrazivi pentru curățare.

Păstrați orificiile de ventilație ale încărcătorului de baterii curate și fără praf acumulat. Îndepărtați praful și curățați carcasa încărcătorului de baterii cu o cârpă ușor umezită, dacă este necesar.

4.2.3. Dezinfecție

PRECAUȚII

Risc de daună

- Dezinfecția poate fi efectuată numai de persoane instruite. Consultați distribuitorul specializat.

4.3. Depanare

Chiar dacă utilizați scaunul cu roțile în mod corespunzător, pot apărea probleme tehnice. În acest caz, contactați distribuitorul specializat local.

AVERTISMENT

Riscul de răniri și/sau daune

- NU încercați NICIODATĂ să reparați singur scaunul cu roțile.
- În cazul defectării consolei de comandă, trebuie să contactați distribuitorul specializat.

El/ea va decide dacă consola trebuie reprogramată.

În caz de defecțiune, pe consola de comandă se afișează un cod de eroare.

Pentru o prezentare generală a tuturor codurilor de eroare de pe consola de comandă, citiți manualul consolei de comandă.

Următoarele simptome pot indica o problemă gravă. Prin urmare, contactați întotdeauna distribuitorul specializat dacă observați oricare dintre următoarele abateri:

- Sunete ciudate;
- Cablaje uzate/deteriorate;
- Conectori crăpați sau ruși;
- Uzură inegală a benzii de rulare la unul dintre pneuri;
- Mișcări sacadate;
- Scaunul cu roțile se abate într-o parte;
- Ansambluri de roți deteriorate sau rupte.
- Scaunul cu roțile nu pornește (siguranță arsă);
- Scaunul cu roțile este alimentat, dar nu se mișcă, a se vedea 4.3.1..

4.3.1. Protecție la suprasarcină

Pentru a proteja motorul împotriva suprasolicitării, acesta se oprește automat în următoarele situații:

- urcarea sau coborârea pantelor care depășesc înclinația maximă indicată în capitolul 5.

- sarcina nominală depășește limita superioară.

Pentru a utiliza din nou scaunul cu roțile: puneți joystick-ul în poziție neutră, eliminați suprasolicitarea și așteptați până când motorul se răcește.

4.4. Durata de viață estimată

Scaunul cu roțile este proiectat să aibă o durată de viață medie de 5 ani. În funcție de frecvența de utilizare, condițiile de conducere și întreținere, durata de viață a scaunului cu roțile va crește sau va scădea.

4.5. Reutilizare

Înainte de fiecare reutilizare, scaunul cu roțile trebuie dezinfectat, inspectat și revizuit conform instrucțiunilor din § 4.1. și § 4.2..

4.6. Sfârșitul utilizării

La sfârșitul duratei de viață, trebuie să eliminați scaunul cu roțile în conformitate cu legislația locală privind mediul. Cel mai bun mod de a face acest lucru este să demontați scaunul cu roțile pentru a facilita transportul pieselor reciclabile.

4.7. Garanție

Garanția pentru acest produs este supusă termenilor și condițiilor generale ale fiecărei țări.

5. Specificații tehnice

Detaliile tehnice de mai jos sunt valabile numai pentru acest scaun cu roțile, la setările standard și în condiții ambientale optime. Luați în considerare aceste detalii în timpul utilizării. Valorile nu mai sunt aplicabile dacă scaunul cu roțile a fost modificat, deteriorat sau este foarte uzat. Rețineți că performanța de conducere este influențată de temperatura ambientală, umiditate, pante (urcare/coborâre), tipul de suprafață și starea bateriei.

Marca	Vermeiren
Grupa de produse	Scaun cu roțile electric, clasa B
Model	Forest 3
Descriere	Dimensiuni
Greutatea maximă a utilizatorului	130 kg
Lungime totală cu suport pentru picioare	1120 mm (la unghiul scaunului 0°)
Lățime totală (în funcție de lățimea scaunului)	595 mm - 610 mm - 650 mm
Înălțime totală	1036 mm (la unghiul scaunului 0°)
Lungime pliată/demontată (suporturi pentru picioare îndepărtate, consolă rotită spre interior, adâncime standard a suportului pentru picioare)	836 mm (la unghiul scaunului 0°)
Greutate totală	139 kg
Masa părții celei mai grele	Cadru: 135,10 kg

Consum de energie *	6 km/h : Aprox. 50km 10 km/h : Aprox. 42 km 14 km/h : Aprox. 37 km
Panta nominală	9°
Urcarea obstacolelor	100 mm
Viteza maximă înainte	6 km/h 10 km/h 14 km/h
Distanța minimă de frânare de la viteza maximă	6 km/h : 1 m 10 km/h : 2,1 m 14 km/h : 3,9 m
Unghiul planului scaunului	<i>Cu scaun și spătar reglabile manual: 1,7° - 5,7° - 9,7° Cu scaun și spătar reglabile electric: 0° - 15°</i>
Adâncimea efectivă a scaunului	420 mm - 520 mm
Lățimea efectivă a scaunului	400 mm - 450 mm - 500 mm

Marca	Vermeiren
Grupa de produse	Scaun cu roțile electric, clasa B
Model	Forest 3
Descriere	Dimensiuni
Înălțimea suprafeței scaunului la marginea din față	415 mm (la unghiul scaunului 0°)
Unghiul planului scaunului	<i>Cu scaun și spătar reglabile manual: 96° - 103° - 109° - 115° - 121° - 129° Cu scaun și spătar reglabile electric: 90° - 137°</i>
Înălțimea spătarului	630 mm
Distanța dintre platforma pentru picioare și scaun	271 mm - 391 mm
Unghiul dintre picioare și suprafața scaunului	85°
Unghiul platformei pentru picioare	-50° până la 60°
Unghiul cotierei	11° până la 26° 101° (pliat)
Raza minimă de virare	Aprox. 1320 mm
Lățimea de mers în marșarier	1200 mm
Garda la sol	74 mm
Diametrul roților din spate	Cursă: 350 x 70 mm aer Profil bloc: 342 x 70 mm aer
Diametrul roților din față	260 x 85 mm aer; 230 x 65 mm air ;

	200 x 50 mm aer
Presiune anvelope **	Max. 3,5 bar
Min. battery	2 x 12V AGM / 80 Ah / C20
Motor	6 km/h: 2 x 220W 10 km/h: 2 x 350W 14 km/h: 2 x 550W Cu sistem de frânare electromagnetică
Siguranță arsă	150 AMP
Încărcător de baterie	8A ; IP21 ; Clasa de izolare II
Nivel de zgomot	< 65 dB(A)
Grad de protecție	IPX4
Teste de rezistență conform	ISO 7176-8
Teste ale sistemului de alimentare și control conform	ISO 7176-14
Inflamabilitatea tapițeriei conform	EN 1021-2:2006
Conformitate EMC	ISO 7176-21
Evaluare generală a sistemului de siguranță cu A centuri de siguranță	

Marca	Vermeiren
Grupa de produse	Scaun cu roțile electric, clasa B
Model	Forest 3
Descriere	Dimensiuni
Temperatura de depozitare și utilizare	+5°C - +41°C
Temperatura de funcționare pentru componentele electronice	-10°C to +40°C
Umiditatea de depozitare și utilizare	30% - 70%
Ne rezervăm dreptul de a introduce modificări tehnice. Toleranță de măsurare +/- 15 mm / 1,5 kg / 1,5° * Distanța teoretică de deplasare va fi redusă dacă scaunul cu roțile este utilizat frecvent pe pante, teren accidentat sau pentru a urca borduri. ** Deoarece pot fi utilizate diferite tipuri de anvelope, vă rugăm să rețineți presiunea corectă de funcționare a anvelopelor pe care le utilizați. Pentru alte diametre ale anvelopelor, consultați distribuitorul specializat.	



Formular de înregistrare a serviciului

Acest produs (denumire):

a fost inspectat (I), întreținut (S), reparat (R) sau dezinfectat (D):

De către (ștampilă)	De către (ștampilă)	De către (ștampilă)
Mod de lucru: I / S / R / D Data:	Mod de lucru: I / S / R / D Data:	Mod de lucru: I / S / R / D Data:
De către (ștampilă)	De către (ștampilă)	De către (ștampilă)
Mod de lucru: I / S / R / D Data:	Mod de lucru: I / S / R / D Data:	Mod de lucru: I / S / R / D Data:
De către (ștampilă)	De către (ștampilă)	De către (ștampilă)
Mod de lucru: I / S / R / D Data:	Mod de lucru: I / S / R / D Data:	Mod de lucru: I / S / R / D Data:
De către (ștampilă)	De către (ștampilă)	De către (ștampilă)
Mod de lucru: I / S / R / D Data:	Mod de lucru: I / S / R / D Data:	Mod de lucru: I / S / R / D Data:
De către (ștampilă)	De către (ștampilă)	De către (ștampilă)
Mod de lucru: I / S / R / D Data:	Mod de lucru: I / S / R / D Data:	Mod de lucru: I / S / R / D Data:

VERMEIREN GROUP
Vermeirenplein 1/15
2920 Kalmthout
Belgium www.vermeiren.com



Version: G, 2024-08
Basic UDI-DI: 5415174122127Forest3KF

Toate drepturile rezervate, inclusiv traducerea.

VERMEIREN
ne pasă de tine