

Instrucțiuni de utilizare

Sistem ortopedic de poziționare Beanseat Stabilo System



Vă mulțumim că ați ales produsul nostru. NOEL a proiectat și fabricat Sistemul ortopedic de poziționare Beanseat Stabilo respectând cele mai înalte standarde de siguranță și funcționalitate. Suntem încrezători că produsul nostru va îndeplini cele mai ridicate cerințe și așteptări ale dumneavoastră. Aceste instrucțiuni de utilizare fac parte integrantă din Sistemul ortopedic de poziționare Beanseat Stabilo. Vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile înainte de a utiliza produsul.

Sistem de poziționare prin vid pentru stabilizarea trunchiului, capului și membrilor - Sistem ortopedic de poziționare Beanseat Stabilo

Produs destinat copiilor și adulților cu paralizie cerebrală, care compensează și atenuează dizabilitatea prin stabilizarea pacientului în poziție șezut sau culcat.

INDICAȚII

Sistemul ortopedic de poziționare Beanseat Stabilo poate fi utilizat pentru:

- Atenuarea efectelor menținerii unei poziții pentru perioade îndelungate (de exemplu, contracturi)
- Stabilizarea pacientului cu flaciditate musculară

AVERTISMENTE PRIVIND SIGURANȚA PRODUSULUI

- Menținerea pacientului mult timp într-o singură poziție poate provoca escare.
- Se recomandă utilizarea unei huse aerisite dacă este necesară o ventilație suplimentară în jurul corpului.
- Evitați contactul cu obiecte ascuțite care ar putea deteriora suprafața.
- Nu curățați cu soluții pe bază de solvenți, de exemplu tolueen sau acetona.
- Nu trageți de supapă.
- Nu supraîncărcați cu aer scaunul.

- Folosiți doar pompa specială inclusă cu scaunul pentru umflare.
- Nu călcați.
- În caz de ruptură, micro-granulele pot ieși, ceea ce poate fi periculos pentru copiii mici.
- Dispozitivul poate fi utilizat numai de persoane care au primit instrucțiuni sau instruire.

ATENȚIE

- Grosimea saltelei se poate reduce în mod natural cu 5% în perioada inițială de utilizare
- În cazul unor modificări considerabile ale temperaturii, utilizați din nou pompa pentru a obține o duritate adecvată (temperatura mai ridicată înmoaie salteaua, temperatura mai scăzută întărește salteaua)

INSTRUCȚIUNI PENTRU UTILIZAREA POMPEI ELECTRICE

1. Scoateți tubul din cutia cu pompă electrică.
2. Deșurubați capacul supapei, înșurubați tubul (partea filetată) în supapa saltelei și introduceți celălalt capăt al tubului în mufa SOFT a pompei electrice. Porniți pompa și așteptați până când salteaua devine suficient de moale, apoi opriți pompa.
3. Începeți să modelați salteaua (fie manual pentru a ajusta forma, fie prin așezat sau sprijinire pe aceasta).
4. Schimbați poziția tubului de la SOFT la HARD și porniți pompa pentru a elimina aerul până când se atinge duritatea dorită.
5. Deșurubați tubul, puneți capacul la loc și strângeți-l.
6. Pentru a schimba forma, repetați pașii de la 2 la 5.



ÎNTREȚINERE

- Verificați în mod regulat starea produsului – acordați atenție eventualelor crăpături sau rupturi.

- Înșurubați capacul supapei înainte de spălare.
- Spălați manual fotoliul sub jet de apă, folosind un detergent obișnuit, de exemplu detergent de vase.
- Poate fi spălat în mașina de spălat la un ciclu de 40°C – este suficient balsamul de rufe, nu este necesară folosirea detergentului pudră.
- Ștergeți și uscați cu un prosop de hârtie.
- Pot fi folosite dezinfectantele standard utilizate în spitale.
- Nu folosiți soluții de curățare pe bază de solvenți, cum ar fi toluenul sau acetona.

GARANȚIE

- Garanția este oferită pentru o perioadă de 24 de luni.
- Garanția nu acoperă deteriorările mecanice ale Sistemului ortopedic de poziționare Beanseat Stabilo
- În caz de nelămuriri, vă rugăm să contactați direct vânzătorul sau producătorul.
- Raportați orice incident direct vânzătorului sau producătorului.

DECLARAȚIA DE CONFORMITATE

Dispozitivul medical Sistem ortopedic de poziționare Beanseat Stabilo respectă cerințele esențiale ale Directivei 93/42/CEE.



NOEL s.c.
str. Romanowicz, nr. 6, 30-702 Krakow
+ 48 12 341 53 16
www.stabilo.krakow.pl
stabilo@stabilo.krakow.pl



Poduszki Stabilo/Stabilo Cushions



stabilocushions-official



stabilo cushion



Nr. doc. IU/MSS 2.1-PL/EN
Ed. 2 /2019
actuală până 03.05.2021